

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャストイングワックス JMDN16189000
ピュア キャストラインワックスⅡ

【警告】

- ・本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。

【禁忌・禁止】


- ・指定された用途以外には使用しないこと。
- ・人体、口腔内で直接使用しないこと。

【使用目的又は効果】

本材は、ロストワックス法により、義歯用クラブス、バー、金属床のロウ型、スプルー線及び各種ベント用として使用する。

【形状、構造及び原理等】

形 状： 円柱状（断面が円状、半円状、扁平型、楕円方で棒状）

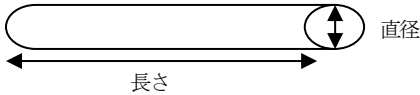

主成分：パラフィンワックス・蜜ロウ・色素

【型番・サイズ】

	直径	長さ	断面の形状	本数／箱
MR 0 5	0. 5	2 0 0	円型	1 0 0 本
MR 0 7	0. 7			
MR 1 0	1. 0			
MR 1 2	1. 2			
MR 1 5	1. 5			
MR 2 0	2. 0			5 0 本
MR 2 5	2. 5			
MR 3 2	3. 2			
MR 4 0	4. 0			
MR 5 0	5. 0			
MR 6 0	6. 0			7 本

表1 単位：mm 誤差± 2%

	径／高さ	長さ	断面の形状	本数／箱
MH 1 4	1. 4／1. 1	2 0 0	半円型	1 0 0 本
MH 1 6	1. 6／1. 1			
MH 1 8	1. 8／1. 1			
MH 1 9	1. 9／1. 0			
MH 2 2	2. 2／1. 2			
MH 2 8	2. 8／1. 1			
MP	4. 0／1. 0		扁平型	5 0 本
ML	3. 1／1. 4		楕円型	5 0 本

表2 単位：mm 誤差± 2%

【試験項目】

- 外観試験：目視による。
- 寸法試験：デジタルノギス(スケール)・デジタル天秤で測定
- 軟化試験：室温水に浸したワックスを恒温水槽を用いて 4 5℃まで 3℃／分の加温を行い、ワックスの軟化状態を目視及び触感で判断する。
- 剥離試験：室温において指で押さえ、圧折、圧接させたときにワックスがササグレ（剥離）しないこと。

生産同 LOT から任意に 1 0 本程度抜き取りで、実施する。

【使用方法等】

- ・ロストワックス法の通常操作法に従い、義歯のバー、クラスプ等の鋳造用ろう型を製作する際に、本材を用途に応じて適量とり、屈折、圧接及び接着して使用する。
- ・通常は常温（室温）で使用して頂き、温水に浸漬してご使用いただければより複雑な原型も容易にできます。

【使用上の注意】

- 1) 警告
【警告】の項目に記載のとおり。
- 2) 禁忌・禁止
【禁忌・禁止】の項目に記載のとおり。
- 3) 使用注意
 - ・室温で使用して下さい。
 - ・本材は、可燃性なので、使用の際は、火傷しないように注意する。
 - ・使用場所には、消火器を備えること。
 - ・本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・保管は、直射日光、高温の場所を避けて保管する。
- ・開封後は密閉し保管すること。
- ・使用及び保管場所には、消火器等の消火装置を備えて下さい。
- ・水分、腐食性薬剤（酸・アルカリなど）及び蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管する。
- ・本品は可燃性なので、火気の近くでの保管や同じ所で大量に保管しないこと。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 クエスト
〒773-0009
徳島県小松島市芝生町西居屋敷 53-1
TEL：0885-38-9777 FAX：0885-38-9888

製造業者

- ・株式会社クエスト
- ・株式会社 名城ラボ・メルト化学研究所 春日井工場