

歯科材料 07 歯科用ワックス  
一般医療機器 歯科用キャストイングワックス JMDN16189000

# ピュア ワックスディスク

## 【警告】


- ・本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。

## 【禁忌・禁止】

- ・指定された用途以外には使用しないこと。
- ・人体、口腔内で直接使用しないこと。

## 【形状、構造及び原理等】


形状：円盤  
色 調：青色・グレー  
硬 さ：R:レギュラー  
H:ハード

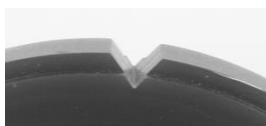

V字カット  
※本品を機器に再装着する際の目印になります。

包装  
内容量：1枚箱

## 寸法

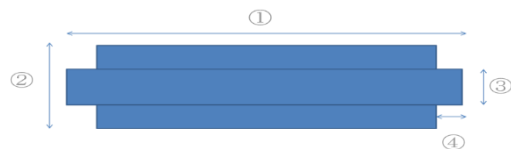

|         | ①直径   | ②全厚さ  | ③ツバ厚さ | ④ツバ長   |
|---------|-------|-------|-------|--------|
| R17     | 98 mm | 17 mm | 10 mm | 2.5 mm |
| R22・H22 | 98 mm | 22 mm | 10 mm | 2.5 mm |

表1

単位：mm

- ・本品を切削機に装着する場合は、V字の切れ込みを一定の位置になるよう装着してください。（※本品を機器に再装着する際の目印になります。）
- ・本材を使用中、又は使用前に異物混入などの不具合が生じた場合は直ちに使用を中止すること。
- ・研削物等の微粉が、目、口等に入らない様に保護メガネ、防塵マスク等を着用の上、作業を行うこと。万が一、研削物等の微粉が目に入った場合は直ちに作業を中止し、直ぐに多量の流水で洗浄し、専門医の診断をうけること。
- ・本材を焼却の際は、局所排気装置、換気扇などで換気を行い、焼却によって発生するガス（煙や蒸気）を吸入しないこと。また、密閉された部屋での作業を避けること。
- ・本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・クリストバライト系埋没材を使用する場合は、急激な加熱を避けて下さい。
- ・ワックスパターンはある程度の間隔（1mm以上）をあけて植立して下さい。

## 【保管方法及び有効期間等】

### 【保管方法】

- ・保管は、直射日光、高温の場所を避けて保管する。
- ・本材は、火気厳禁の場所に保管し、使用及び保管場所には消火装置を備えること。
- ・水分、腐食性薬剤（酸・アルカリなど）及び蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管する。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

### 【製造販売業者】

株式会社 クエスト  
〒773-0009  
徳島県小松島市芝生町西居屋敷 53-1  
TEL：0885-38-9777 FAX：0885-38-9888

### 【製造業者】

- ・株式会社クエスト
- ・クエスト デンタル マテリアル コーポレーション  
QUEST DENTAL MATERIAL CORPORATION  
(PHILIPPINES)

## 【使用目的又は効果】

本材は、ロストワックス法による固定式補綴補修物のろう型作製のキャストイングワックスである。

## 【使用方法等】

CAD/CAM 装置で本材を切削加工し、補綴物等の初期の形態を得る。得られた形態を調整し、その後、鋳造・研磨を行う。

## 【使用上の注意】

### 1) 警告

【警告】の項目に記載のとおり。

### 2) 禁忌・禁止

【禁忌・禁止】の項目に記載のとおり。

### 3) 使用注意

- ・本材は、【使用目的又は効果】に定められた用途以外には使用しないこと。
- ・本材は、可燃性なので、使用の際は、火傷しないように注意する。