

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

アクアブルーペースト

【禁忌・禁止】

- ・指定された用途以外には使用しないこと。
- ・口腔内では使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

形 状：ペースト状
色調：ブルー（青白色）
内容量：220g/ケース（誤差範囲±2%）
主成分：水、酸化アンモニウム（合成）、水溶性溶剤、界面活性剤

【使用目的又は効果】

本品は、補綴物等（金属、レジン樹脂）の仕上げ研磨に用いる研磨材である。

【使用方法等】

本材は、歯科用ハンドピースやマイクロモーターに装着した歯科技工用ブラシやバフを回転させながらその外縁に本材を付着させて補綴物に接触させて研磨を行う。

【使用上の注意】

- 1) 禁忌・禁止
【禁忌・禁止】の項目に記載のとおり。
- 2) 使用注意
 - ・本材は、【使用目的又は効果】に定められた用途以外には使用しないこと。
 - ・本材は口腔内で使用しないこと。
 - ・高速回転で使用すると本材が飛び散る恐れがありますので注意し、 $10,000\text{min}^{-1}$ 以下で使用すること。
 - ・研削物等の微粉が、目、口等に入らない様に保護メガネ、防塵マスク等を着用の上、作業を行うこと。万が一、研削物等の微粉が目に入った場合は直ちに作業を中止し、直ぐに多量の流水で洗浄し、専門医の診断をうけること。
 - ・本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・保管は、直射日光、高温の場所を避けて、常温（0～30℃）で保管すること。
- ・水分、腐食性薬剤（酸・アルカリなど）及び蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管する。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

（製造販売業者）

株式会社 クエスト
〒773-0009
徳島県小松島市芝生町西居屋敷53-1
TEL：0885-38-9777 FAX：0885-38-9888

（製造業者）

- ・K I テック株式会社
- ・株式会社クエスト