

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス JMDN16189000

インレーグリーンソフト

【警告】

- ・本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。

【禁忌・禁止】

- ・指定された用途以外には使用しないこと。
- ・人体への直接の使用はしないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

株式会社 クエスト

〒773-0009

徳島県小松島市芝生町西居屋敷 53-1

TEL : 0885-38-9777 FAX : 0885-38-9888

〔製造業者〕

・株式会社クエスト

・クエスト デンタル マテリアル コーポレーション

QUEST DENTAL MATERIAL CORPORATION
(PHILIPPINES)

【形状、構造及び原理等】

形状：ブロック

色調：グリーン

種類：#4、#5



1 枚（ブロック）、6 個ピースから成る。

寸法（mm）

ブロック：79×94×13

ピース：27×35×13

【物理的性質】

加圧短縮率

30℃	2.0%未満
40℃	5.0%未満
45℃	20.0%未満

焼却残さ

0.1%以下

内容量：2 枚／箱

【使用目的又は効果】

本材は、ロストワックス法により、固定式補綴物のロウ型作製のキャスティングワックスである。

【使用方法等】

- ①技工用ガスバーナー、電気ポット等により液状化させて下さい。
- ②適量を取り出し、支台歯に盛り上げ、ロウ型を作製して下さい。
- ③ロウ型の作製は歯科技工の通法に従い作業して下さい。

【使用上の注意】

1) 警告

【警告】の項目に記載のとおり。

2) 禁忌・禁止

【禁忌・禁止】の項目に記載のとおり。

3) 使用注意

- ・本品は可燃性であるので使用の際、火傷しないように注意すること。
- ・本品は鋳造用ロウ型作製以外の目的に使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・室温保管
- ・本品を高温の場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所等）に保管しないこと。
- ・使用及び保管場所には消火設備を備えること。
- ・本品は火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・本品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。