

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用パラフィンワックス JMDN70893000

ジーエムパラフィンワックス

【警告】
・本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。

【禁忌・禁止】
・指定された用途以外には使用しないこと。
・溶解された本材を直接人体に使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

形 状： 板状
サイズ：

種 類	厚さ	大きさ
レギュラーサイズ	1.4mm	146×74mm

内容量： 1kg／箱

主成分：パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックス、ミツロウ、カルナバワックス、色素等

【物理的性質】

加圧短縮率（％）：

温 度	短縮率（％）
21℃	2.0%未満
37℃	3.0%未満
45℃	50.0%未満

【使用目的又は効果】

義歯の仮床、人工歯の排列、ロウ堤作製に用いるワックス。

【使用方法等】

【義歯の仮床】

- ① 作業模型の大きさに合わせてカットする。
- ② 火炎等で適度に軟化し、作業模型に圧接する。
- ③ 過不足部分を削除又は追加し、形状を整える。

【人工歯の排列】

- ① 火炎等で適度に軟化し、巻き棒状にする。
- ② 棒状にしたワックスを馬蹄形に曲げ、義歯の仮床に圧接する。
- ③ 過不足部分を削除又は追加し、形状を整える。
- ④ 歯科技工の通法に従い、人工歯を排列する。

【ロウ堤の作製】

- ① 火炎等で適度に軟化し、巻き棒状にする。
- ② 棒状にしたワックスを馬蹄形に曲げ、基礎床に圧接する。
- ③ 過不足部分を削除又は追加し、形状を整える。

【使用上の注意】

1) 警告

【警告】の項目に記載のとおり。

2) 禁忌・禁止

【禁忌・禁止】の項目に記載のとおり。

3) 使用注意

- ・可燃性であるため、使用の際に火傷をしないように注意する。
- ・溶解された当該品を直接人体に使用しない。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・直射日光、高温多湿の場所を避けて保管する
- ・火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しない。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

株式会社 クエスト
〒773-0009
徳島県小松島市芝生町西居屋敷 53-1
TEL：0885-38-9777 FAX：0885-38-9888

【製造業者】

- ・株式会社クエスト
- ・クエスト デンタル マテリアル コーポレーション
QUEST DENTAL MATERIAL CORPORATION
(PHILIPPINES)

販売元

株式会社 Global Management

〒153-0063

東京都目黒区目黒 1-6-17 目黒プレイスタワー1F

T E L：03-6431-8862

F A X：03-6431-8765