

歯科材料 09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 JMDN70903000

# ピュア バイカラーホイール

## 【警告】


- ・最高許容回転速度(回転数)を超えて使用しないこと。

## 【禁忌・禁止】

- ・指定された用途以外には使用しないこと。
- ・無理な角度や過度の加圧はしないこと。

## 【形状、構造及び原理等】

形状: 円盤(ディスク)状の作業部からなる。

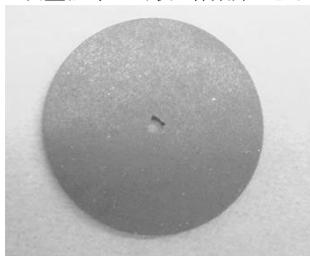

寸法

	外径	厚さ	孔径
円盤 (ディスク)	22.0(±0.2) mm	1.0(±0.2) mm	1.6(±0.2) mm

梱包

25枚/ケース

## 【使用目的又は効果】

合成ゴムを基材(結合材)として作られた研磨材で、歯科材料の軟質・硬質レジン、パラジウム合金、コバルトクロム合金などの研削および研磨に用いる。

## 【使用方法等】

専用マンドレールにしっかりと装着し、緩み等ないことを確認してから歯科用駆動装置または歯科用技工回転機器に装着し、Max 25,000回転以下で回転させ、ソフトタッチで断続的に被研削物に押しつけて研削、研磨する。

## 【使用上の注意】

1) 警告

【警告】の項目に記載のとおり。

2) 禁忌・禁止

【禁忌・禁止】の項目に記載のとおり。

3) 使用上の注意

- ・歯科用駆動装置または歯科用技工回転機器(ハンドピースメーカー)の指定に従って確実に装着して使用すること。
- ・作業に入る前に必ず安全な方向に向けて空回転させ芯振れ、その他の危険を取り除くこと。
- ・本材で使用する研削、研磨を行う場合は集塵装置、公的機関が認定した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ・本材を使用して研削、研磨を行う際は、保護メガネ等を使用すること。
- ・本材で研削、研磨の作業の際、万一、粉塵等が入った場合には、直ちに大量の水で洗浄した後、専門医(眼科医)の診断を受けること。
- ・本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないで下さい。

## 【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・直射日光、高温は避けて保管する。
- ・水分、腐食性薬剤および蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)および汚染を受けないように保管する。
- ・本品は、歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管管理すること。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

- ・株式会社 クエスト  
〒773-0009  
徳島県小松島市芝生町西居屋敷 53-1  
TEL: 0885-38-9777 FAX: 0885-38-9888

製造業者

- ・株式会社 ダイテックジャパン
- ・株式会社 クエスト