

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 JMDN70903000

ピュア バイカラーポイント

【警告】

- ・最高許容回転速度(回転数)を超えて使用しないこと。

【禁忌・禁止】

- ・指定された用途以外には使用しないこと。
- ・無理な角度や過度の加圧はしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・直射日光、高温は避けて保管する。水分、腐食性薬剤および蒸気の暴露を避けて外圧(物理的負荷)および汚染を受けないように保管する。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 クエスト

〒773-0009

徳島県小松島市芝生町西居屋敷 53-1

TEL: 0885-38-9777 FAX: 0885-38-9888


製造業者

株式会社 ダイテックジャパン

株式会社 クエスト

【形状、構造及び原理等】

形状: 下図の様に作業部と軸部からなる。

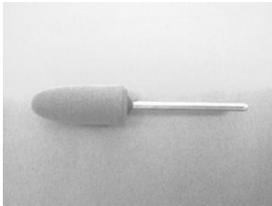

寸法

#	全長	作業部		軸部	
		長さ	太さ(外径)	長さ	太さ(外径)
ビッグ	56.0(±0.5)	24.5(±0.5)	10.0(±0.2)	31.5(±0.2)	2.33(±0.01)
13	49.8(±0.5)	16.0(±0.5)	5.2(±0.2)	33.8(±0.2)	2.33(±0.01)

単位: mm

梱包

#ビッグ	#13
6本入り/ケース	12本入り/ケース
12本入り/ケース	120本入り/ケース
60本入り/パッチ袋	

【使用目的又は効果】

合成ゴムを結合材として作られた研削材で、歯科材料の軟質・硬質レジン、パラジウム合金、コバルトクロム合金などの研削、および研磨に用いる。

【使用方法等】

歯科用駆動装置または歯科用技工回転機器に装着し、指定 MAX 回転以下で回転させ、ソフトタッチで断続的に被研削物に押しつけて研削、研磨する。

#ビッグ	MAX10,000 回転以下
#13	MAX30,000 回転以下

【使用上の注意】

1) 警告

【警告】の項目に記載のとおり。

2) 禁忌・禁止

【禁忌・禁止】の項目に記載のとおり。

3) 使用注意

- ・本品を歯科用駆動装置または歯科用技工回転機器等に取り付ける際は、メーカーの指示に従って、しっかり取り付けて下さい。
- ・無理な角度、過度の加圧での使用は、破損、変形をまねくので避けて下さい。
- ・研削物等の微粉が、目、口等に入らない様に保護メガネ、防塵マスク等を着用の上、作業を行うこと。万が一、研削物等の微粉が目に入った場合は直ちに作業を中止し、直ぐに多量の流水で洗浄し、専門医の診断をうけること。
- ・本品は、歯科用研削材及び研磨材の用途以外には使用しないこと。
- ・本品は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。