

歯科材料 09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

# ピュア Ti-Co ホイール HP

## 【禁忌・禁止】

- ・本材は、使用目的以外に使用しないこと。
- ・無理な角度、過度な加圧での使用はしないこと。
- ・適切な回転数で使用する。


## 【保管方法及び有効期間等】

### 〔保管方法〕

- ・化学薬品と一緒に収納・管理しないこと。
- ・水分、腐食性薬剤（酸・アルカリなど）及び蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管する。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

## 【形状、構造及び原理等】

形状：以下のとおり

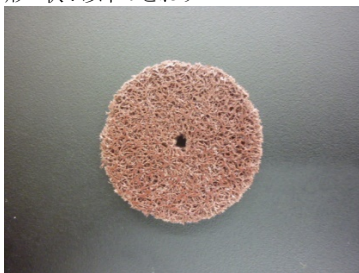

主成分：ナイロン不織布／混合樹脂研磨剤

内容量： 5枚／袋（5枚／ケース）

仕様

|          | 規格（サイズ等）            |
|----------|---------------------|
| ① 径（φmm） | φ20mm（適正範囲19～21mm）  |
| ② 厚み（mm） | 4mm（適正範囲：3.5～4.5mm） |
| 最高許容回転数  | 10000rpm            |

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 クエスト

〒773-0009 徳島県小松島市芝生町字西居屋敷53-1

TEL：0885-38-9777 FAX：0885-38-9888

製造業者

株式会社 KI テック

## 【使用目的又は効果】

本材は、補綴物等の研磨に用いる器材で、チタンやコバルトの様な硬い金属の研磨・研削に使用する。

## 【使用方法等】

レーズに確実に装着したのち、回転させ補綴物等と接触させることで補綴物等を研磨する。

## 【使用上の注意】

### 1.) 禁忌・禁止

【禁忌・禁止】の項目に記載のとおり。

### 2) 使用注意

- ・長時間連続的に使用すると熱を帯びることがあるので断続的に使用すること。
- ・回転数は、貴金属の場合で5000～8000rpmを推奨する。
- ・無理な角度、過度な加圧での使用は、破折、破損を招くので避けること。
- ・研磨物等の微粉が目、口等に入らない様に保護メガネ、マスク等を着用の上、作業を行うこと。万一、研磨物等の微粉が目等に入った場合は、直ちに作業を中止し、直ぐに多量の流水で洗浄し、専門医の診断を受けること。
- ・本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。