

ピュア モデルトリマーディスク

【禁忌・禁止】

- ・最高許容回転速度(回転数)を超えて使用しない。
- ・指定された用途以外には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

形状: 以下のとおり。



付属品
補強板/金属スリーブ
ゴムワッシャー

仕様

直径 (mm)	穴径 (mm)	粗さ	回転速度 MAX
230	22	中目粗	2000rpm
230	22	荒目粗	2000rpm

原材料: ガラスクロス/シリコンカーバイト/エポキシ樹脂系硬化剤
無機顔料/(塩化ビニール/アルミ合金/合成ゴム)

【使用目的又は効果】

炭化ケイ素等を用いるディスク状の技工用研削材で、石膏・埋没材等を迅速に研削できる。

【使用方法等】

歯科用技工回転機器に装着し、回転数 MAX 2,000 回転以下で回転させ、ソフトタッチで断続的に被研削物に軽く押しつけて研削、研磨する。

【使用法】

トリマー中央シャフトにより付属品の金属スリーブを使用する。

種類	規格(シャフト穴径)	付属金属スリーブ
シクロス用	22mm	使用する。
モリタ用	19mm	使用する。
ヨシダ用	19mm	使用しない。

ディスクと中央シャフトとの締め付けネジの隙間がある場合は、付属のゴムワッシャーを使用下さい。

【使用上の注意】

1.) 禁忌・禁止

【禁忌・禁止】の項目に記載のとおり。

2) 使用上の注意

- ・回転機器(トリマー機器)等に取付ける際は、メーカーの指示に従って確実に取付ける。
- ・無理な角度、過度の加圧での使用は、破損、破折を招くので避ける。
- ・研削物等の微粉が、目、口等に入らない様に保護メガネ、防塵マスク等を着用の上、作業を行うこと。万が一、研削物等の微粉が目に入った場合は直ちに作業を中止し、直ぐに多量の流水で洗浄し、専門医の診断をうけること。
- ・歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・水分、腐食性薬剤(酸・アルカリなど)及び蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管する。
- ・歯科の医従事者以外が触れないように適切に保管、管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 クエスト

〒773-0009 徳島県小松島市芝生町西居屋敷53-1

電話: 0885-38-9777

Fax: 0885-38-9888

製造業者

・有限会社 プロップ

・株式会社 クエスト