

歯科材料 09 歯科用研削材料


一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 JMDN70903000

# グローバルホワイト

【禁忌・禁止】

- ・最高許容回転速度（回転数）を超えて使用しない。
- ・指定された用途以外には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

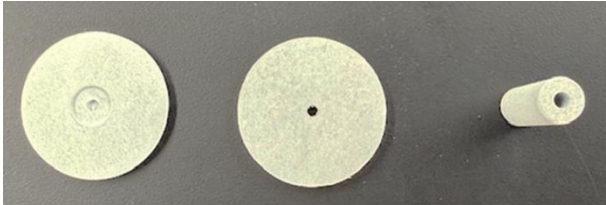

円盤状（ディスク状）及び円柱状（シリンダー状）の形態である  
色調は、グレー（灰色）で個体差があります。

| No. | 型      | サイズ                                 | 推奨回転速度                |
|-----|--------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1   | ホイール   | 円盤状（ディスク状）<br>直径：22 mm／厚さ：3 mm      | 7,000～10,000<br>(rpm) |
| 2   | シリンダー  | 円柱状（シリンダー状）<br>直径：6 mm／長さ（厚さ）：23 mm |                       |
| 3   | ナイフエッジ | 円盤状（ディスク状）<br>直径：22 mm／厚さ：3.5 mm    |                       |

包装：10 pcs／箱（袋） 100 pcs／箱

【使用目的又は効果】

本品は、炭化ケイ素を研磨成分とするゴム基材で結合された歯科用研磨材  
である。貴金属及びレジンの中仕上げから仕上げ研磨までに利用する。

【使用方法等】

1. 操作方法
- ①本品を市販のマンドレールにしっかり取付け、マイクロモーター  
ハンドピース（歯科技工用回転機器）に取り付ける。メーカーの  
指示に従って、シャンクをしっかりと奥まで入れてチャックを締め  
ていることを確認する。
  - ②使用前に予備回転させて、振れないことを確認すること。
  - ③被研磨物に作業部をあて回転させ、フェザー（ソフト）タッチで  
研磨・研削する。
  - ④破折の原因となる無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

【禁忌・禁止】の項目に記載のとおり。

【使用上の注意】

- ①推奨許容回転速度（回転数）7000～10000rpm を超えて使用しない  
こと。
  - ②使用にあたってはハンドピースメーカーの指示に従って、シャン  
クを確実に奥まで挿入し半チャックではないことを確認するこ  
と。
  - ③使用前に予備回転を行い、振れないことを確認すること。
  - ④本品が変形、キレツ、損傷等のあるものは使用しないこと。
  - ⑤本品を使用して研磨を行う場合は、局所集塵装置、公的機関が認  
定した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
  - ⑥本品の使用により発疹、湿疹、発赤、かゆみ、かぶれ、しびれ等  
の過敏症状が現れた患者又は術者においては、直ちに使用を中止  
し、専門医の診断を受けさせる又は受けること。
  - ⑦本品は研削、研磨の際には保護メガネ等を使用すること。
  - ⑧本品が万一目に入った場合には、直ちに大量の水で洗浄した後。  
眼科医の診断を受けさせる又は受けること。
  - ⑨本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 【保管方法】
- ①湿気や腐食性化学物質、またはその蒸気にさらされないように保管する  
こと。
  - ②外的圧力（物理的な負荷）、汚染を避けること。
  - ③室温で、直射日光を避ける場所に保管すること。
  - ④歯科の医従事者以外が触れないように適切に保管、管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 クエスト  
〒773-0009 徳島県小松島市芝生町字西居屋敷53-1  
電話：0885-38-9777  
FAX：0885-38-9888

製造業者

SHANGHAI TOBOOM DENTAL TECHNOLOGY CO.,LTD  
(中国)