


NEOディスプレイ鍼

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

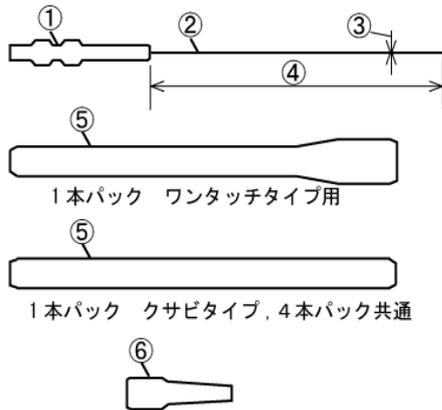

〈名称及び材質〉

	名称	材質
①	鍼柄	銅
②	鍼体	ステンレス鋼線材
③	鍼体径	
④	鍼体長	
⑤	鍼管	ポリプロピレン
⑥	クサビ	ポリプロピレン

〈サイズ表〉

番 手	鍼 体 径 [mm]	鍼体長 [mm]			
		1寸	1寸3分	1寸6分	2寸
0番	0.14	○	○	○	—
1番	0.16	○	○	○	—
2番	0.18	○	○	○	—
3番	0.20	○	○	○	○
4番	0.22	○	○	○	—
5番	0.24	○	○	○	○

—は製造しておりません

〈仕様〉

鍼体の公称線径に応じ、鍼体の中心軸方向に力を加えたとき鍼体は鍼柄より引き抜けない。

【使用目的又は効果】

鍼治療に使用すること。

【使用方法等】

- ・滅菌済みにつき、刺入・抜鍼を1回限りで廃棄のこと。
 - ・治療の際には、必ず附属の鍼管をご使用ください。
- 1) 鍼を刺入する患部を消毒する。
 - 2) プリスターパックを開封し、鍼管と鍼を取り出す。開封後は直ちに使用してください。
 - 3) 鍼管に鍼が装着済みのものについては、使用直前にストップ—又はクサビをはずしてから使用する。

- 4) 皮膚に刺入し、鍼治療に使用する。
- 5) 治療後は必ず抜鍼したことを確認してください。
- 6) 使用後の鍼は、感染防止に留意し、安全な方法で廃棄してください。

* 〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

- 1) ご使用前に必ず鍼及び鍼管を点検してください。損傷や湾曲のある場合は使用しないでください。
- 2) 刺入の深さは、鍼体長の1/3以上は残してください。
- 3) 筋肉への治療においては筋肉硬直により、折鍼の危険があります。2番(0.18mm)以上の鍼を使用し、患者の緊張を取りながら、注意して施術してください。
- 4) 刺入した鍼が抜けなくなった時は、患者をリラックスさせ、筋肉を弛緩させる処置を行い、ゆっくりと真っ直ぐ抜いてください。抜く際には、鍼を曲げたり回したりしないでください。折鍼の危険があります。
- 5) 使用中に患者が動いた場合、折鍼の危険がありますので咳等に注意しながら施術してください。
- 6) 灸頭鍼として使用する場合は、火傷の危険がありますので、注意深く観察し、変化・異常があれば早急に適切な処置を施してください。また、熱により鍼が劣化しますので取扱いにご注意ください。

【使用上の注意】

*1. 使用注意(次の患者には慎重に適用すること)

- 1) ニッケル、クロム等のステンレス成分にアレルギーのある方
- 2) 悪性腫瘍のある方 [悪性腫瘍の成長・転移を促す可能性がある]
- 3) 出血性疾患の方 [出血を助長する可能性がある]

*2. 重要な基本的注意

- 1) 個別包装により無菌を保っています。開封後は直ちに使用し開封後使用しなかった鍼は廃棄してください。
- 2) 鍼体材料は細線で曲がり易く、鍼体強度以上の力を加えた場合損傷する可能性があります。材料の特性に合わない使用はしないでください。
- 3) 通電に適した鍼ではありません。通電等で生じた事故についての責任は負いません。

*3. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

- 1) 妊婦へは、流産、陣痛の促進等の可能性があるため、原則として使用は避ける。使用が必要な場合は細心の注意を払うこと。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- ・直射日光、水ぬれ、高温多湿及びその他の物質で汚染される可能性のある場所を避け、子供の手の届かない所に保管してください。

<有効期間>

- ・箱に記載の使用期限を参照 [自己認証による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社山正

電話番号：0749-74-0330

製造業者：Wujiang City Hua Xin Medical Appliance Co.,Ltd.
(中国)