

機械器具 80 はり又はきゆう用器具
管理医療機器 滅菌済み鍼 JMDN コード 34175000


再使用禁止

NEO ディスポ鍼 S

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

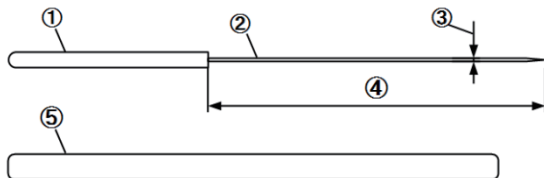

〈各部の名称〉

| | 名称 |
|---|--------------|
| ① | 鍼柄 |
| ② | 鍼体（ステンレス鋼線材） |
| ③ | 鍼体径 |
| ④ | 鍼体長 |
| ⑤ | 鍼管 |

** 〈サイズ表〉

| 番手 | 鍼体径 [mm] | 鍼体長 [mm] | | | | |
|-----|----------|----------|----|------|------|----|
| | | 5分 | 1寸 | 1寸3分 | 1寸6分 | 2寸 |
| 03番 | 0.10 | ○ | — | — | — | — |
| 02番 | 0.12 | ○ | — | — | — | — |
| 0番 | 0.14 | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| 1番 | 0.16 | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| 2番 | 0.18 | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| 3番 | 0.20 | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4番 | 0.22 | — | ○ | ○ | ○ | — |
| 5番 | 0.24 | — | ○ | ○ | ○ | ○ |

—は製造していません

〈仕様〉

鍼体の公称線径に応じ、鍼体の中心軸方向に力を加えたとき鍼体は鍼柄より引き抜けない。

【使用目的又は効果】

鍼治療に使用すること。

【使用方法等】

- ・滅菌済みにつき、包装開封後直ちに使用し、刺入、抜鍼を一回限りで廃棄のこと。
- ・鍼管付のものは必ず附属の鍼管をご使用ください。

- 1) 鍼を刺入する患部を消毒する
- 2) ブリスターバック包装を開封し、鍼を取り出す。（鍼管付きのものは鍼管と鍼の固定を解除し、鍼は鍼管から取り出さずに刺入部位に鍼管をあてる）
- 3) 鍼を刺入し、鍼治療に使用する（鍼管付のものは、鍼管からのぞいている鍼柄を軽く叩いて切皮し、鍼管を外す）
- 4) 治療後は必ず抜鍼したことを確認する
- 5) 使用後の鍼は、感染防止に留意し、安全な方法で廃棄する

* 〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

- 1) ご使用前に必ず、鍼及び鍼管を点検してください。損傷や湾曲のある場合は使用しないでください。
- 2) 刺入の深さは、鍼体長の1/3以上は残して刺入してください。
φ0.14mm以下の鍼を使用する場合は、鍼体長の1/2以上残して刺入してください。
- 3) 筋肉への治療においては筋肉硬直により折鍼の危険があります。2番（0.18mm）以上の鍼を使用し、患者の緊張を取りながら注意して施術してください。
- 4) 刺入した鍼が抜けなくなった時は、患者をリラックスさせ、筋肉を弛緩させる処置を行い、ゆっくりと真っ直ぐ抜いてください。抜く際には、鍼を曲げたり回したりしないでください。折鍼の危険があります。
- 5) 使用中に患者が動いた場合、折鍼の危険がありますので咳等に注意しながら施術してください。

【使用上の注意】

*1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）

- 1) ニッケル、クロム等のステンレス成分にアレルギーのある方
- 2) 悪性腫瘍のある方〔悪性腫瘍の成長・転移を促す可能性がある〕
- 3) 出血性疾患の方〔出血を助長する可能性がある〕

*2. 重要な基本的注意

- 1) 個別包装により無菌を保っています。開封後は直ちに使用し開封後使用しなかった鍼は廃棄してください。
- 2) 鍼体材料は細線で曲がり易く、鍼体強度以上の力を加えた場合損傷する可能性があります。材料の特性に合わない使用はしないでください。
- 3) 通電に適した鍼ではありません。通電等で生じた事故についての責任は負いません。
- 4) 灸頭鍼としてはご使用いただけません。

*3. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

- 1) 妊婦へは、流産、陣痛促進等の可能性があるため、原則として使用は避ける。使用が必要な場合は細心の注意を払うこと。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- ・直射日光、水ぬれ、高温多湿及びその他の物質で汚染される可能性のある場所を避け、子供の手の届かない所に保管してください。

〈有効期間〉

- ・箱に記載の使用期限を参照〔自己認証による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社山正

電話番号：0749-74-0330

製造業者：Maanshan Bond Medical Instruments Co.,Ltd.

（中国）