

2003 年 4 月作成(第 1 版)
2021 年 9 月改訂(第 4 版)

届出番号 : 18B1X00001000003

機械器具 (25) 医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 31776000
YASUNAGA Dental Mirrors

【形状・構造及び原理等】

原材料 : ステンレス、鏡 (ガラス)



No. 2 : 18mm
No. 3 : 20mm
No. 4 : 22mm
No. 5 : 24mm
No. 6 : 26mm

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 安永コンピュータシステム株式会社

第一種医療機器製造販売業

電話番号 : 0776-33-5333 FAX 番号 : 0776-33-5334

製造業者 : DEWIMED Medizintechnik GmbH 社 (ドイツ)

【使用目的又は効果】

口腔内診査または圧排のために用いる歯科用器具。

【使用方法等】

歯鏡用ハンドルに装着して使用する。

使用後は滅菌を行う。

高圧蒸気滅菌により滅菌処理を必ず行うこと。

温度: 121℃ 時間: 20~30 分間

【使用上の注意】

1) 使用注意

1. 万が一、製品に変形等の異常がある場合は使用を中止すること。
2. 錆、変色、劣化、変形等の品質低下の原因になるため、本品を高温・多湿な場所に長時間置かないこと。
3. 強アルカリ、強酸性の洗浄液や消毒液は、本品を腐食させる恐れがあるので使用を避けること。
4. 本品を長期間使用した場合、素材の金属疲労や磨耗等によりミラーの機能、耐久性の低下を招くことがある。適宜、新しい製品と取り替えて使用すること。
5. 本品を廃棄する場合は、「廃棄物処理に関する法律」に従って適切に処理すること。

2) 取扱上の注意

1. 使用前に必ず点検し、洗浄、滅菌を行うこと。
2. 滅菌後は水分を拭き取り、乾燥させること。
3. 190℃以上に加熱しないこと。

【保管方法及び有効期限等】

1. 高温・多湿、直射日光を避け、ほこりのない清潔な場所に保管すること。
2. 変形や破損の原因となりうる硬い物への接触や、衝撃は避けること。
3. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。