

機械器具（60） 歯科用エンジン
一般医療機器 歯科技工用トリマ 70741000

歯科技工用トリマー

【形状・構造及び原理等】

種類：3種類

Dual Wheel Model Trimmer（#W108）

PRO Dual Wheel Model Trimmer（#W108P）

Single Wheel Model Trimmer（#W125O）



本体寸法・重量

1) 寸法 Dual Wheel Model Trimmer W:546xD:460xH:400mm
PRO Dual Wheel Model Trimmer W:546xD:460xH:400mm
Single Wheel Model Trimmer W:395xD:460xH:445mm

2) 重量 Dual Wheel Model Trimmer 29kg
PRO Dual Wheel Model Trimmer 32kg
Single Wheel Model Trimmer 22kg

定格電圧 100V～120V

周波数 50Hz/60Hz

最大消費電力 300W

【使用目的又は効果】

顎態模型、平行模型等の石膏を削合するために用いる機器。
モータで駆動する研削ディスクを備える。

【使用方法等】

ホイールを回転させ模型を削る。

【使用方法に関連する使用上の注意】

本機器には、純正部品、純正アクセサリ以外は使用しないこと。

【使用上の注意】

1) 使用注意

1. 本機器は水平な台へ設置すること。
2. ショートや感電の恐れがあるので、本機器に水をかけないこと。
3. 変形や破損の原因となるため本体の上に物を置かないこと。
4. 使用後は必ずメインスイッチを切り、長時間使用しない場合は電源プラグを抜くこと。
5. 他の器具と併用すると、コンセントが異常に発熱したり、ブレーカーが作動したりすることがあるので、定格15A以上のコンセントを単独で使用すること。

2) 重要な基本的注意

1. 使用後はディスクやテーブル周辺を洗浄し、付着した石膏を洗い流すこと。付着した石膏は詰まりや故障の原因になるため、日頃から点検清掃を行うこと。
2. 万が一、故障したときは勝手に分解せず、修理は専門家にまかせること。

【保管方法及び有効期限等】

1. 水濡れに注意し、高温・多湿、直射日光の当たる場所を避けて保管すること。
2. 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）などに対する安定状態に注意すること。
3. 化学薬品の近くやガスの発生する場所に保管しないこと。
4. 本機器は、歯科従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前に使用説明書を必ずよく読むこと。

1. 機器及び部品は必ず定期点検を行うこと。
2. しばらく使用しなかった機器を再使用するときは、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：安永コンピュータシステム株式会社
第一種医療機器製造販売業
電話番号：0776-33-5333 FAX番号：0776-33-5334
製造業者：WEHMER Corporation（アメリカ）

取扱説明書を必ずご参照ください。