

機械器具（36）医療用ピンセット
一般医療機器 歯科治療用ピンセット 31814000

ヤスナガピンセット

【禁忌・禁止】

1. 本製品の誤った使用法は破損を招くため、使用目的以外に使用しないこと。必要以上の力を加えないこと。
2. 本製品の加工、改造等は破損や故障の原因となるため、絶対に行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 原材料
ステンレス鋼
2. 形状・構造
V 字形をなしバネをそなえる。
3. 作動・動作原理
ハンドル部の操作を先端部に伝え、先端部を可動させる。

【使用目的又は効果】

2 つの先細のバネ性先端部をもつ歯科用器具。この先端部を開閉させ、口腔内に適用する創傷被覆・保護材を把持する。

【使用方法等】

- 1) 使用前
 1. 変形や破損がないかを確認する。
 2. 本品は未滅菌のため、使用前は必ず洗浄、滅菌を行う。
- 2) 使用方法
ハンドル部を操作し、先端部を開閉させて、口腔内に適用する創傷被覆・保護材を把持したり、ブラケットを保持したりする。
- 3) 使用後の洗浄・消毒・滅菌について
 1. 洗浄
使用後は、表面に付着している血液、体液、組織片及び薬品等が乾燥しないように直ちに洗浄すること。
 2. 消毒
二次感染を防止するため、熱消毒又は薬液消毒を行うこと。
 3. 滅菌
高圧蒸気滅菌により滅菌処理を必ず行うこと。
温度：121℃ 時間：20～30 分間

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 1. 万が一、製品に変形等の異常がある場合は使用を中止すること。
 2. 錆、変色、劣化、変形等の品質低下の原因になるため、本品を高温・多湿な場所に長時間置かないこと。
 3. 強アルカリ、強酸性の洗浄液や消毒液は、本品を腐食させる恐れがあるので使用を避けること。
 4. 本品を長期間使用した場合、素材の金属疲労や磨耗等により機能、耐久性の低下を招くことがある。適宜、新しい製品と取り替えて使用すること。
 5. 本品を廃棄する場合は、「廃棄物処理に関する法律」に従って適切に処理すること。

2) 取扱上の注意

1. 使用前に必ず点検し、洗浄、滅菌を行うこと。
2. 本製品を取り扱う際は、先端部に十分注意すること。
3. 床に落とす等の強い衝撃を与えないこと。
4. 滅菌後は水分を拭き取り、乾燥させること。

【保管方法及び有効期限等】

1. 水濡れに注意し、高温・多湿、直射日光を避け、ほこりのない清潔な場所に保管すること。
2. 変形や破損の原因となりうる硬い物への接触や、衝撃は避けること。
3. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
4. 歯科従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：安永コンピュータシステム株式会社
第一種医療機器製造販売業
電話番号：0776-33-5333 FAX 番号：0776-33-5334
製造業者：Karl Hammacher GmbH（ドイツ）