

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 内視鏡下灌流・吸引器(JMDN コード：70465000)

ディスポーザブルアダプタ

再使用禁止

【警告】

本品に過剰な力を加えないこと。[本品が破損する恐れがある。]


【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止
[品質が劣化する恐れがある。]

【形状・構造及び原理等】

* <形状・構造>

1. 各部の名称

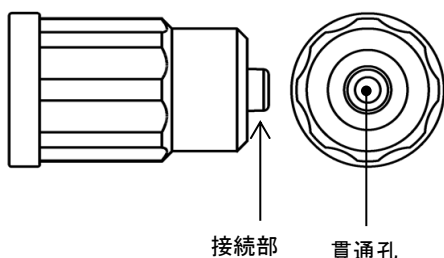

2. 体に接触する部分の組成

本品：ポリカーボネート

* 3. 製品仕様

- (1) 本品はエチレンオキサイトガス滅菌済みの製品である。
- (2) 接続部は IS080369-7 (旧 IS0594-1/-2) に適合するオスルアーテーパーと嵌合すること。

<原理>

器具同士の接続に使用する。

【使用目的又は効果】

本品は、体腔又は管腔の内視鏡による観察を容易にするため、本品に別の対象物を接続することにより、貫通孔を通じて液体で灌流・吸引（洗浄効果）することを目的としたものである。

【使用方法等】

<使用方法>

併用する器具を装着し、接合状態を確認する。

* <組み合わせて使用する医療機器>

本品は、株式会社平和医療器械が製造販売する「販売名：洗浄吸引ブローブセット、医療機器届出番号：35B2X10001000015」と併用して使用できる。

* <使用方法等に関連する使用上の注意>

本書は臨床手技には立ち入っていない。臨床手技については、それぞれの専門の立場から判断すること。

【使用上の注意】

* <重要な基本的注意>

1. 接続不良による液漏れや外れが生じる恐れがあるため、本品を器具等と接続する際、接続部に緩みが生じないように、しっかり接続すること。
2. 貫通孔で薬液が詰り、意図した吸引や洗浄が行えない恐れがあるため、高粘度の薬液等は使用しないこと。
3. 損傷による機能不良の恐れがあるため、本品の取り扱いには十分注意し、落としたり、ぶつけたり、衝撃を加えないこと。

<不具合・有害事象>

本製品の使用に際して、次の可能性がある。

1. 不具合
機器の破損
2. 有害事象
感染・汚染

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

室温下で水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

<有効期間>

包装ラベルに使用期限を表示している。[自己認証(自社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：
山科精器株式会社
電話番号：077-558-2350
〒520-3001 滋賀県栗東市東坂 525 番地