

吸引用コネクタ

再使用禁止

【警告】

カテーテル又はチューブ類に接続する際は、内径に適合するサイズのコネクタであることを必ず確認してから使用すること。[カテーテル又はチューブ類との接続不良による漏れや外れの恐れがある。]


【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 本製品は未滅菌品である為、吸引以外に使用しないこと。[感染防止の為。]
3. 消毒、清拭等の目的で、アルコール、アセトン、ベンジン等の有機溶媒を使用しないこと。[コネクタ部や接続するチューブ類に上記の有機溶媒を直接接触させると強度が低下し、破損する恐れがある。]

【形状・構造及び原理等】

* <形状・構造>

1. 各部の名称

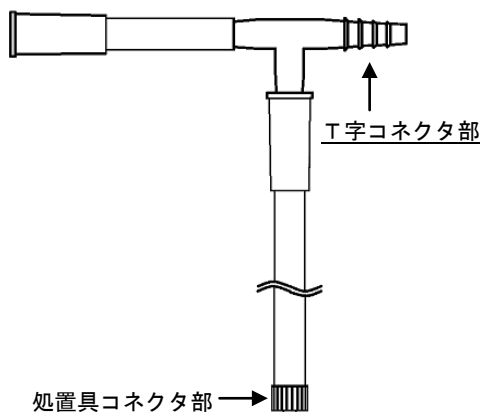

* 2. 製品仕様

- (1) 本製品は未滅菌製品である。
- (2) 処置具コネクタ部は ISO 80369-7 (旧 ISO594-1/-2) に適合するオスルーアテーバーと嵌合すること。
- (3) T字コネクタの適合チューブ内径：φ7～φ10 mm

* <原理>

本製品を別の対象物に接続することによって、コネクタを通じて吸引を行うことができる。

【使用目的又は効果】

本製品は、カテーテル及び内視鏡を、別の対象物に接続するために用いる。

【使用方法等】

<使用方法>

1. 接続する器具類又はチューブ類の径を確認し、しっかりと接続する。
2. 接続後は、本製品と他の器具類がしっかりと接続されていることを確認し、必要に応じて結束バンドを併用するなどの補強策を取る。

* <組み合わせて使用する医療機器>

本製品は、弊社が製造販売する「販売名：内視鏡外付け持続吸引カテーテル、医療機器届出番号：25B2X10005000007」と併用して使用できる。

* <使用方法等に関連する使用上の注意>

本書は臨床手技には立ち入っていない。臨床手技については、それぞれの専門の立場から判断すること。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 接続したカテーテルやチューブを鉗子等でクランプする場合、本製品と一緒にクランプしないこと。
2. 接続部の漏れや外れに注意し、適宜増し締め、締め直し等の適切な処置を行うこと。
3. 吸引操作中はカテーテル又はチューブ類との接続部を観察し、排液の量や性状、吸引等異常が無いことを確認すること。
- * 4. 接続不良による液漏れや外れが生じる恐れがあるため、本製品を他の器具等と接続する際、接続部に緩みが生じないように、しっかり接続すること。
- * 5. 損傷による機能不良の恐れがあるため、本製品の取り扱いには十分注意し、落としたり、ぶつけたり、衝撃を加えないこと。

<不具合・有害事象>

本製品の使用に際して、次の可能性がある。

1. 不具合
接続不良による漏れ、吸引不良、エアリーク
- * 2. 有害事象
感染、汚染

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

室温下で水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

* <使用期限>

点検時に不良箇所を認めたり、不良が疑われる時は使用しない。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：山科精器株式会社
電話番号：077-558-2350
〒520-3001 滋賀県栗東市東坂 525 番地