

アルショットバン

再使用禁止


【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、アクリル系粘着剤を塗布した不織布粘着テープとポリオレフィンネット付き不織布パッドからなる救急絆創膏です。

本品は、エチレンオキサイドガス滅菌済みです。

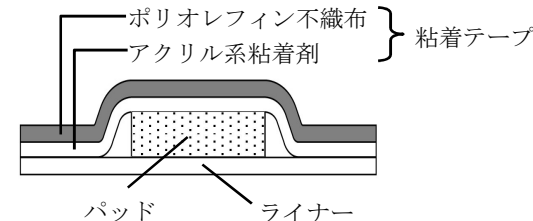

	全体サイズ (パッドサイズ)
S サイズ	20mm×20mm (8mm×8mm)
M サイズ	27mm×27mm (13mm×13mm)

【使用目的又は効果】

注射・採血・点滴・関節穿刺等の穿刺部及び創面の保護

【使用方法等】

- 貼付部位を清潔にして使用してください。
- ライナーより本品を剥がし、穿刺部にパッドをあて、貼付してください。
- 貼付後、しばらくの間貼付部位を軽く押さえてください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

本品の使用により発疹・発赤、かゆみ等が生じた場合は、使用を中止し、適切な処置を行ってください。

2. その他の注意

- 滅菌袋に破損、汚損、水濡れなどがみられるものは使用しないでください。
- 使用中、上から水などで濡らすことは避けてください。
- 使用中、汚れたり濡れたりした場合は、新しいものと貼りかえてください。
- 使用中、背面に血液や滲出液などのにじみがみられた場合は、新しいものと貼りかえてください。
- 剥がす時は、皮膚を傷めないようゆっくり剥がしてください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて、室温で保管してください。

2. 有効期間

3 年（自己認証による）
使用期限は外箱に記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：⊕ 祐徳薬品工業株式会社

発売元：アルフレッサ メディカルサービス株式会社

[お問い合わせ窓口]

祐徳薬品工業株式会社 お客様相談窓口

〒849-1393 佐賀県鹿島市大字納富分 2596 番地 1

TEL 0954-63-1320

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）