

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 手術用被覆・保護材 34654000

S & T シリコンシート

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 適用対象（患者）

- （1）原材料に対してアレルギー反応を引き起こすおそれのある患者。


2. 使用方法

- （1）本品は 1 回限りの使用のみで、再使用はしないこと。
（2）29 日以上、使用部位に留置したままにしないこと。
（3）S & T 未滅菌シリコンシートの事前洗浄には、合成洗剤や油性石鹸は使用しないこと。〔成分が製品本体に吸収され、その後溶け出して組織反応を引き起こす可能性がある。〕

【形状・構造及び原理等】


1. 形状、構造

- （1）S & T 滅菌シリコンシート

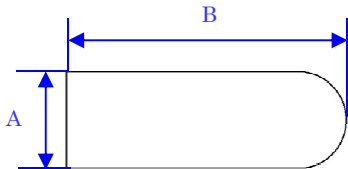

1710000


商品コード	規格	幅 A(mm)	長さ B(mm)
1710000	6mm×20mm 透明	6.0	20.0
1710000-B	6mm×20mm 青	6.0	20.0
1710001	6mm×40mm 透明	6.0	40.0
1710001-B	6mm×40mm 青	6.0	40.0

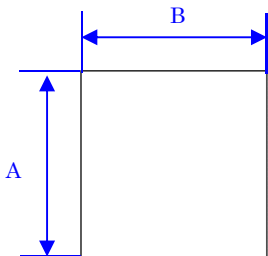

1720000

商品コード	規格	幅 A(mm)	長さ B(mm)
1720000	15mm×15mm 透明	15.0	15.0
1720001	3mm×15mm 透明	3.0	15.0

- （2）S & T 未滅菌シリコンシート

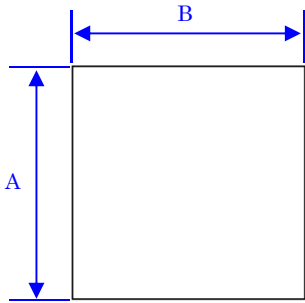

商品コード	幅 A(mm)	長さ B(mm)
2030005	300.0	300.0

2. 原材料（接触部の組成）

シリコンエラストマー

3. 動作原理

創部に留置し、上からガーゼタンポンや綿球等により圧迫、固定して術後創傷の被覆や保護に用いる。水分を含ませて粘着性を高めてから使用する。

【使用目的又は効果】

本品は、術後創傷の被覆や保護に用いるシリコン製のシートである。

【使用方法等】

1. 使用前の確認

【S & T 滅菌シリコンシート】

- （1）包装に破損がないことを確認する。
（2）使用部位の状態に合わせて適切なサイズのものを選択する。

【S & T 未滅菌シリコンシート】

- （1）必要に応じて切って大きさを調整する。
（2）本品が十分に洗浄、滅菌されていることを確認する。

2. 準備・操作

- （1）本品を湿らせ、粘着性を高める。
（2）創部に留置する。
（3）本品の上からガーゼタンポンや綿球を留置して、圧迫、固定する。

3. 使用后

- （1）単回使用であるため、廃棄する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- （1）未滅菌品は必ず適切な滅菌を行い、滅菌されたことを確認してから使用すること。
（2）滅菌品は使用前に滅菌期限を必ず確認し、期限が切れた後は使用しないこと。
（3）本品の滅菌包装材を開封する時には、病院の通常の開封手順に従うこと。
（4）ガス滅菌はシリコン製品には推奨されない。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温、多湿、直射日光、水濡れを避け、乾燥した清潔な場所に室温で保管すること。

2. 有効期間

製造後 5年

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄・滅菌方法

- (1) 清潔な柔らかい毛のブラシと温水石鹼液で十分にこすり、表面に付着している可能性のある汚れを取り除く。このとき、非油性石鹼を使用すること。
- (2) 蒸留水で十分にすすぐ。
- (3) 必ず滅菌（高圧蒸気滅菌）を施し、滅菌されたことを確認すること。

例) 高圧蒸気滅菌推奨条件

温度	暴露時間	形式
132℃以上	10 分間	ブリバキューム

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

ユフ精器株式会社

〒113-0034

東京都文京区湯島 2 丁目 31 番 20 号

T E L : 03-3811-1131

F A X : 03-3811-1727

外国製造業者

インヴォテック インターナショナル インク (アメリカ)

Invotec International, Inc. (USA)