

医療用品 04 整形用品

一般医療機器 手術用被覆・保護材 34654000

S & T EONシリコンシート

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 適用対象（患者）
  - (1) 原材料に対してアレルギー反応を引き起こすおそれのある患者。
2. 使用方法
  - (1) 本品は1回限りの使用のみで、再使用はしないこと。
  - (2) 再滅菌は行わないこと。

【形状・構造及び原理等】


1. 形状、構造

- (1) S & T EONシリコンシート

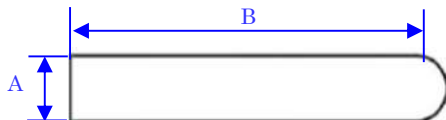


E3146UUS-206B

商品コード	規格	幅 A(mm)	有効長 B(mm)
E3146UUS-206C	20mm×6mm 透明	6.0	20.0
E3146UUS-206B	20mm×6mm 青	6.0	20.0
E3146UUS-406C	40mm×6mm 透明	6.0	40.0
E3146UUS-406B	40mm×6mm 青	6.0	40.0

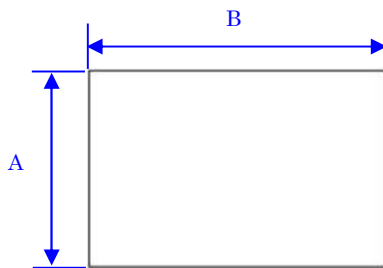

E3146MS

商品コード	規格	幅 A(mm)	長さ B(mm)
E3146MS	55mm×75mm×0.5mm 透明	55.0	75.0
E3146NS	55mm×75mm×1mm 透明	55.0	75.0
E3146UUS	38mm×50mm×0.13mm 透明	38.0	50.0
E3146UUSB	38mm×50mm×0.13mm 青	38.0	50.0

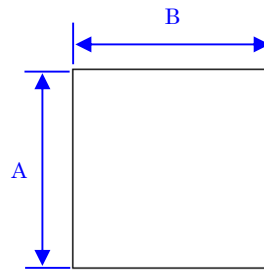

商品コード	規格	幅 A(mm)	長さ B(mm)
E3146UUS-1515C	15mm×15mm 透明	15.0	15.0

2. 原材料（接触部の組成）

シリコン

3. 動作原理

創部に留置し、縫合固定して術後創傷の被覆や保護に用いる。

【使用目的又は効果】

本品は、術後創傷の被覆や保護に用いるシリコン製のシートである。

【使用方法等】

1. 使用前の確認

- (1) 包装に破損がないことを確認する。
- (2) 使用部位の状態に合わせて適切なサイズのものを選択する。  
必要に応じて切って大きさを調整する。

2. 準備・操作

- (1) 本品を鼻／耳内に留置する。
- (2) 鼻中隔壁に縫合固定する。

3. 使用后

- (1) 単回使用であるため、廃棄する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 使用前に滅菌期限を必ず確認し、期限が切れた後は使用しないこと。
- (2) 本品の滅菌包装材を開封する時には、病院の通常の開封手順に従うこと。
- (3) 誤嚥や移動を防ぐため、縫合固定すること。

2. 有害事象

- (1) 軽度の癬痕化
- (2) 局所感染

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温、多湿、直射日光、水濡れを避け、乾燥した清潔な場所に25℃以下で保管すること。

2. 有効期間

製造後 3年

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

**製造販売業者**

ユフ精器株式会社

〒113-0034

東京都文京区湯島2丁目31番20号

TEL : 03-3811-1131

FAX : 03-3811-1727

**外国製造業者**

イーオーエヌ メディテック ピーブイティアー エルティアーデ  
ィー (インド)

EON Meditech PVT. LTD. (India)