


機械器具 38 医療用鉤
一般医療機器 鉤 35105000
両頭鉤

【形状・構造及び原理等】*

1. 形状及び寸法*

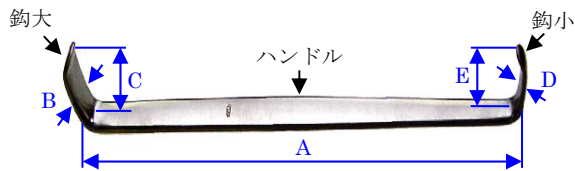

商品名	商品コード	規格	全長 A(mm)
両頭鉤	HF-2460	全長 155mm	155.0
鉤大の幅 B(mm)	鉤大内側 の高さ C(mm)	鉤小の幅 D(mm)	鉤小内側 の高さ E(mm)
10.0	25.0	6.0	20.0

2. 原材料(接触部の組成)

ステンレス鋼

3. 動作原理

一方を把持し、もう一方を切開部から挿入して組織や臓器等を牽引又は圧排し、術野を確保する。

【使用目的又は効果】

本品は、軸様のハンドルをもつ手術器具である。両端が曲がっており、一方を把持し、もう一方を切開部に挿入して使用する。臓器や組織等の牽引又は圧排するために用いる。

【使用方法等】

1. 使用前の確認

本品が十分に洗浄、滅菌されていることを確認する。

2. 準備・操作

- (1) 一方を把持し、もう一方を切開部に挿入する。
- (2) 把持している一方を引っ張り、組織や臓器等を牽引又は圧排する。

3. 使用后

【保守・点検に係る事項】1に示すように洗浄、滅菌する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品は未滅菌品であるので、必ず適切な滅菌を行い、滅菌されたことを確認してから使用すること。
- (2) 本品の使用前に、変形・傷がないか及び不具合を確認の上使用すること。不具合を発見した場合には使用しないこと。
- (3) 破損、曲がり等の原因となり得るので、使用時には必要以上の力を加えないこと。
- (4) 電気メスを用いた接触凝固は、術者が感電、火傷する危険性があり、また、本品の表面を損傷するので、併用しないこと。
- (5) 金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は、表面が損傷するので汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

清潔な場所に室温で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄・滅菌方法

- (1) 水洗いし、付着物を取り除く。
- (2) 石鹼、又は医療用中性洗剤等を用い、柔らかいブラシ、スポンジ等で軽くこすり洗いをする。
- (3) 蒸留水又は脱イオン水を用い、よくすすぎ、乾燥させる。
- (4) 高圧蒸気滅菌、又はEOG滅菌にて滅菌する。

例) 高圧蒸気滅菌推奨条件

温度	時間	気圧
121℃	20分以上	98.067kPa

2. 使用者による保守点検事項

- (1) 本品が漂白剤、消毒液等の塩素及びヨウ素溶液に曝された場合、直ちに清水で洗浄すること。
- (2) 使用後は、表面に付着している血液、体液、組織片及び薬品等が乾燥しないよう直ちに洗浄すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者・製造業者

ユフ精器株式会社

〒113-0034

東京都文京区湯島2丁目31番20号

TEL : 03-3811-1131

FAX : 03-3811-1727