


機械器具 38 医療用鉤
一般医療機器 鉤 35105000

MAPレトラクター

【形状・構造及び原理等】*

1. 形状*

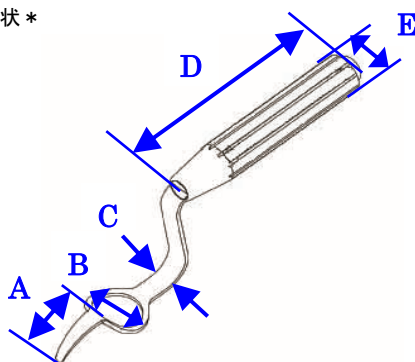

商品名	商品コード	規格	先端部の長さ A(mm)	遠位部の外径 B(mm)	遠位部の巾 C(mm)	ハンドルの長さ D(mm)	ハンドルの巾 E(mm)
MAP レトラクター	MAP —01	スタン ダード	35.0	37.0	13.0	100.0	21.0
	MAP —02	シヨ ート	27.0	37.0	13.0	100.0	21.0

2. 原材料（接触部の組成）

ステンレス鋼

3. 動作原理

手術時に適切な位置より本品を挿入し、膝蓋骨の下部に本品遠位部より挿入しリング状部分を膝蓋骨下部にあて、テコの原理にて膝蓋骨の反転作業を行ない手術野を確保する。

【使用目的又は効果】

本品は、膝関節手術時に、膝蓋骨を反転させ、組織・筋肉・骨等の手術野を確保するために用いる。本品は、再使用可能である。

【使用方法等】

1. 使用前の確認

本品が十分に洗浄、滅菌されていることを確認する。

2. 準備・操作

- （1）本品のハンドル部を手で持ち、術部の創口、組織、筋肉等を広げ挿入する。
- （2）膝蓋骨の下部に本品のリング状部分の上部をあてる。
- （3）膝蓋骨の反転作業を行ない、視野を確保する。

3. 使用後

【保守・点検に係る事項】 1. に示すように洗浄・滅菌する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- （1）本品は未滅菌品であるので、必ず適切な滅菌を行い、滅菌されたことを確認してから使用すること。

- （2）金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、表面が破損するので使用しないこと。
- （3）使用前に、破損・変形亀裂・傷・摩耗がないか、適切に機能するかどうかを点検すること。破損等が確認された場合は使用しないこと。
- （4）破損、曲がり等の原因になり得るので使用時には必要以上の力を加えないこと。
- （5）使用時に、破損し、体内に破損片が残存した場合、腐食やアレルギー、感染症を引き起こす可能性がある。

【保管方法及び有効期間等】

清潔な場所に室温で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄・滅菌方法

- （1）水洗いし、付着物を取り除く。
- （2）石鹼、又は医療用中性洗剤等を用い、柔らかいブラシ、スポンジ等で軽くこすり洗いをする。
- （3）蒸留水または脱イオン水を用い、よくすすぎ、乾燥させる。
- （4）高圧蒸気滅菌、又はEOG滅菌にて滅菌する。

例) 高圧蒸気滅菌推奨条件

温度	時間	気圧
121℃	20分以上	98.067kPa

2. 使用者による保守点検事項

本品が漂白剤、消毒液等の塩素及びヨウ素溶液に曝された場合、直ちに清水で洗浄すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者・製造業者

ユフ精器株式会社

〒113-0034

東京都文京区湯島2丁目31番20号

T E L : 03-3811-1131