

医療用品 03 手術用手袋及び指サック

一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000

再使用禁止

指のう

【禁忌・禁止】

1. 使用方法

- (1) 本品は単回使用のため、再使用禁止。
- (2) 加熱しないこと。[加熱による変形のため耐久性が減少し、破損の恐れがある]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状及び寸法



商品名	商品コード	規格	全長 A (mm)	指部分の長さ B (mm)
指のう	HM-90	100 入	160.0	80.0

2. 原材料（接触部の組成）

ポリエチレン

3. 動作原理

本品を手に装着し、検査、検診、治療行為或いは汚染された医療材料を取り扱う。

【使用目的又は効果】

本品は、手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する合成素材製手袋である。

【使用方法等】

1. 使用前の確認

本品が清潔であることを確認する。

2. 準備・操作

本品を指に装着し、検査、検診、治療行為或いは汚染された医療材料を取り扱う。

3. 使用後

単回使用のため廃棄する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 破損又は汚染などの異常がある場合、使用しないこと。
- (2) 刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴が開くことがあるため注意すること。
- (3) 使用後は感染防止に留意し、医療廃棄物として適切に処分すること。

【保管方法及び有効期間等】

清潔な場所に室温で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者・製造業者

ユフ精器株式会社

〒113-0034

東京都文京区湯島 2 丁目 31 番 20 号

T E L : 03-3811-1131

F A X : 03-3811-1727