

機械器具 38 医療用鉤  
 一般医療機器 鉤 35105000  
**テーパ－脳ベラ**

**【禁忌・禁止】**


1. 併用医療機器

- (1) BR-1520T、BR-1540T、BR-1555Tは、販売名「ドロリトラクターシステム」(製造販売届出番号：13B1X00249PM0003、製造販売業者：ユフ精器株式会社)に適合するように設計されている。他の開創器との併用はしないこと。

**【形状・構造及び原理等】**


1. 形状

(1) 棒なしタイプ

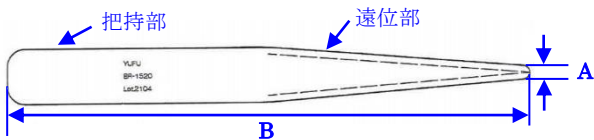

商品コード	規格	先端部の幅 A(mm)	全長 B(mm)
BR-1520	棒なし 先端幅 2mm	2.0	150.0
BR-1540	棒なし 先端幅 4mm	4.0	
BR-1555	棒なし 先端幅 5.5mm	5.5	

(2) DORO用棒付きタイプ

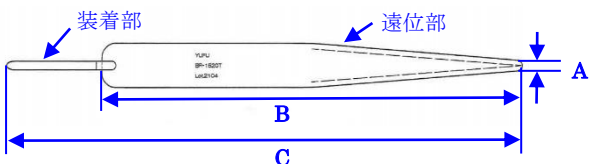

商品コード	規格	先端部の幅 A(mm)	接触部の長さ B(mm)	全長 C(mm)
BR-1520T	DORO用 棒付き 先端幅 2mm	2.0	150.0	184.0
BR-1540T	DORO用 棒付き 先端幅 4mm	4.0		
BR-1555T	DORO用 棒付き 先端幅 5.5mm	5.5		

2. 原材料（接触部の組成）

ステンレス鋼

3. 動作原理

手術時に術部の形状に合うよう任意の角度に曲げ、手で把持又は「ドロリトラクターシステム」に装着し、傷口、

術部等を覆う組織、筋肉などを上げ、術野を確保する。

**【使用目的又は効果】**

傷口、術部等を覆う組織、筋肉などを上げるために用いる。

**【使用方法等】**

1. 使用前の確認

本品が十分に洗浄、滅菌されていることを確認する。

2. 準備・操作

<棒なしタイプ>

- (1) 術部の形状に合わせて任意の角度に曲げる等、調節する。  
 (2) 切開部から挿入し、傷口、組織、筋肉等を上げる。

<DORO用棒付きタイプ>

- (1) 術部の形状に合わせて任意の角度に曲げる等、調節する。  
 (2) ドロリトラクターシステムのアーム部に装着部を取り付ける。  
 (3) 切開部から挿入し、傷口、組織、筋肉等を上げる。

3. 使用后

**【保守・点検に係る事項】** 1. に示すように洗浄・滅菌する。

**【使用上の注意】**

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品は未滅菌品であるので、必ず適切な滅菌を行い、滅菌されたことを確認してから使用すること。  
 (2) 金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、表面が破損するので使用しないこと。  
 (3) 使用前に、破損・変形亀裂・傷・磨耗がないか、適切に機能するかどうかを点検すること。破損等が確認された場合は使用しないこと。  
 (4) 破損、曲がり等の原因になり得るので使用時には必要以上の力を加えないこと。  
 (5) 使用時に、破損し、体内に破損片が残存した場合、腐食やアレルギー、感染症を引き起こす可能性がある。  
 (6) 本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感染予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。  
 (7) 本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。

**【保管方法及び有効期間等】**

清潔な場所に室温で保管すること。

**【保守・点検に係る事項】**

1. 洗浄・滅菌方法

- (1) 水洗いし、付着物を取り除く。

- (2) 石鹼、又は医療用中性洗剤等を用い、柔らかいブラシ、スポンジ等で軽くこすり洗いをする。
- (3) 蒸留水または脱イオン水を用い、よくすすぎ、乾燥させる。
- (4) 高圧蒸気滅菌、又はE O G滅菌にて滅菌する。

例) 高圧蒸気滅菌推奨条件

温度	時間	気圧
121℃	20分以上	98.067kPa

## 2. 使用者による保守点検事項

本品が漂白剤、消毒液等の塩素及びヨウ素溶液に曝された場合、直ちに清水で洗浄すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

#### 製造販売業者・製造業者

ユフ精器株式会社

〒113-0034

東京都文京区湯島 2 丁目 31 番 20 号

T E L : 03-3811-1131

F A X : 03-3811-1727