


機械器具 4 2 医療用剥離子
一般医療機器 起子 11504000
マイクロニードル

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

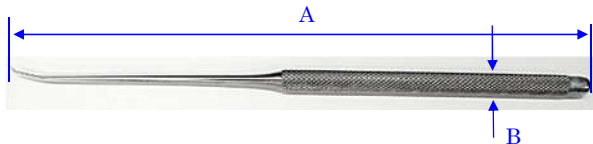

10-625-02-25

商品名	商品コード	規格	先端部の形状	全長 A (mm)	ハンドルの幅 B(mm)
マイクロニードル	10-625-02-25	弱弯 25°		160.0	5.2
	10-625-04-25	中弯 25°			

2. 原材料（接触部の組成）

ステンレス鋼

3. 動作原理

ハンドルを把持し、先端を操作する。細くカーブした先端を組織又は他の解剖学的構造、手術材料又は器具に引っ掛けて持ち上げる、梃子により押し上げる、挿入する、又は適切な位置に配置する。

【使用目的又は効果】

本品は、組織又は他の解剖学的構造、手術材料又は器具の持ち上げ、配置又は梃子による押し上げに用いる手術器具である。ハンドルから先端部が一体化しており、遠位端に行くに従って細くカーブし、鈍い刃、又は切刃のない鉤をもつ。

【使用方法等】

1. 使用前の確認

本品が十分に洗浄、滅菌されていることを確認する。

2. 準備・操作

- （1）ハンドルを把持し、細くカーブした先端を組織又は他の解剖学的構造、手術材料又は器具に引っ掛けて持ち上げる、又は梃子により押し上げる。
- （2）組織又は他の解剖学的構造、手術材料又は器具を適切な場所へ挿入及び配置する。

3. 使用後

【保守・点検に係る事項】 1. に示すように洗浄・滅菌する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- （1）本品は未滅菌品であるので、必ず適切な滅菌を行い、滅菌されたことを確認してから使用すること。
- （2）使用前に、破損・変形亀裂・傷・摩耗がないか、適切に機能するかどうかを点検すること。破損等が確認された場合は使用しないこと。

（3）破損、曲がり等の原因になり得るので使用時には必要以上の力を加えないこと。

（4）使用時に、破損し、体内に破損片が残存した場合、腐食やアレルギー、感染症を引き起こす可能性がある。

（5）感電を防ぐため、電気メス等の電気手術器との接触を避けること。

【保管方法及び有効期間等】

清潔な場所に室温で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄・滅菌方法

- （1）水洗いし、付着物を取り除く。
- （2）石鹼、又は医療用中性洗剤等を用い、柔らかいブラシ、スポンジ等で軽くこすり洗いをする。
- （3）蒸留水または脱イオン水を用い、よくすすぎ、乾燥させる。
- （4）高圧蒸気滅菌、又はEOG滅菌にて滅菌する。

例) 高圧蒸気滅菌推奨条件

温度	時間	気圧
121℃	20 分以上	98.067kPa

2. 使用者による保守点検事項

本品が漂白剤、消毒液等の塩素及びヨウ素溶液に曝された場合、直ちに清水で洗浄すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者・製造業者

ユフ精器株式会社

〒113-0034

東京都文京区湯島 2 丁目 31 番 20 号

T E L : 03-3811-1131

F A X : 03-3811-1727