


機械器具 38 医療用鉤  
一般医療機器 鉤 35105000  
有柄手術用肛門鏡

【形状・構造及び原理等】\*、\*、\*

1. 形状\*


(1) 有柄肛門鏡\*

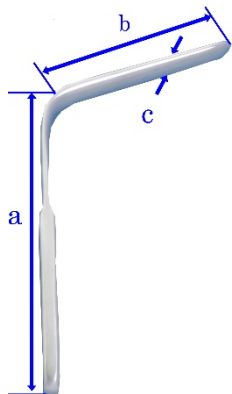

※本品は、2本1組で構成されている。

商品名	規格	商品コード	直線部の長さ a(mm)	挿入部の長さ b(mm)	挿入部の幅 c(mm)
有柄肛門鏡	大	HL-511A	140.0	90.0	17.0
	中	HL-511B	140.0	62.0	15.0
	小	HL-511C	140.0	58.0	12.0
	極小	HL-511D	140.0	45.0	8.0
有柄手術用肛門鏡	大	K-215A	150.0	90.0	18.0
	中	K-215B	150.0	70.0	16.0
	小	K-215C	150.0	60.0	12.0
	極小	K-215D	150.0	45.0	8.0

(2) 棧付肛門鏡

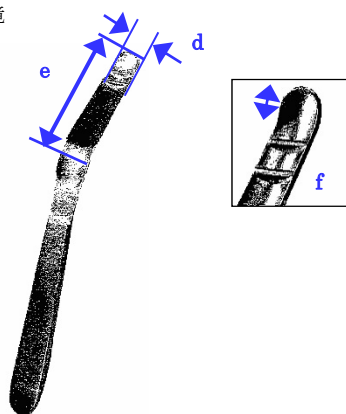

※本品は、1本1組で構成されており、先端は上向きに立ち上がる形状をしている。

商品名	商品コード	挿入部の幅 d(mm)	挿入部の長さ e(mm)	先端起上 f(mm)
棧付肛門鏡	HL-398	15.0	90.0	3.0

2. 原材料(接触部の組成)  
ステンレス鋼

3. 動作原理\*\*

有柄肛門鏡は、2本の挿入部の上面同士が接するように肛門に挿入し、それぞれの把手部を外方向に引っ張ることで、肛門の内径を広げる。

棧付肛門鏡は、上記同様に肛門の内径を広げた後、便を挟み掻き出す。

【使用目的又は効果】

軸様のハンドルをもつ手術器具で、肛門を広げるために用いる。

【使用方法等】

1. 使用前の確認

本品が十分に洗浄、滅菌されていることを確認する。

2. 準備・操作

- 挿入部の上面同士を合わせ、肛門に挿入する。
- 把手部を外側に引っ張り、2本間の距離を離し、肛門を広げる。
- 棧付肛門鏡は、先端部で便を挟み掻き出す。

3. 使用后

【保守・点検に係る事項】1に示したように洗浄、滅菌する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 本品は未滅菌品であるので、必ず適切な滅菌を行い、滅菌されたことを確認してから使用すること。
- 使用前に、破損・変形亀裂・傷・磨耗がないか、適切に機能するかどうかを点検すること。破損等を確認し場合は使用しないこと。
- 破損、曲がり等の原因になり得るので使用時には必要以上の力を加えないこと。
- 金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は、表面が破損するので使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

清潔な場所に室温で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄・滅菌方法

- 水洗いし、付着物を取り除く。
- 石鹼、又は医療用中性洗剤等を用い、柔らかいブラシ、スポンジ等で軽くこすり洗いをする。
- 蒸留水または脱イオン水を用い、よくすすぎ、乾燥させる。
- 高圧蒸気滅菌、又はEOG滅菌にて滅菌する。

例) 高圧蒸気滅菌推奨条件

温度	時間	気圧
121℃	20分以上	98.067kPa

2. 使用者による保守点検事項

本品が漂白剤、消毒液等の塩素及びヨウ素溶液に曝された場合、直ちに清水で洗浄すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者・製造業者

ユフ精器株式会社

〒113-0034

東京都文京区湯島 2 丁目 31 番 20 号

T E L : 03-3811-1131

F A X : 03-3811-1727