

機械器具 38 医療用鉤  
一般医療機器 鉤 35105000  
増田式有柄鉤

【形状・構造及び原理等】\* , \* \*


1. 形状・寸法\*

増田式有柄鉤

[正面]



[側面]

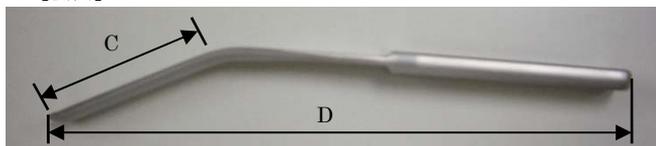

商品コード	挿入部の幅 A(mm)	把手部の長さ B(mm)	挿入部の長さ C(mm)	全長 D(mm)
K-MY-01	16.0	100.0	70.0	213.0

2. 原材料(接触部の組成)

ステンレス鋼

3. 動作原理\* \*

2本の挿入部の上面同士が接するように肛門に挿入し、把手部を外側に引張り、肛門の観察を行う。便があるときは、片方ずつ挿入部を便と直腸壁の間に入れ、便を挟むようにして、手前に引いて摘便する。

【使用目的又は効果】

本品は2本1組で用い、排便困難時の摘便および肛門の観察、診断、治療に用いる。

【使用方法等】

1. 使用前の確認

本品が十分に洗浄、滅菌されていることを確認する。

2. 準備・操作

- (1) 挿入部の上面同士を合わせ、肛門に挿入する。
- (2) 把手部を外側に引張り、肛門の観察を行う。便があるときは、片方ずつ挿入部を便と直腸壁の間に入れて便を挟み、手前に引き、摘便する。

3. 使用後

【保守・点検に係る事項】1. に示すように洗浄・滅菌する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品は未滅菌品であるので、必ず適切な滅菌を行い、滅菌されたことを確認してから使用すること。

- (2) 金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は、表面が破損するので使用しないこと。
- (3) 使用前に、破損・変形亀裂・傷・磨耗がないかを点検すること。破損等が確認された場合は使用しないこと。
- (4) 破損、曲がり等の原因になり得るので使用時には必要以上の力を加えないこと。

【保管方法及び有効期間等】

清潔な場所に室温で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄・滅菌方法

- (1) 水洗いし、付着物を取り除く。
- (2) 石鹼、又は医療用中性洗剤等を用い、柔らかいブラシ、スポンジ等で軽くこすり洗いをする。
- (3) 蒸留水又は脱イオン水を用い、よくすすぎ、乾燥させる。
- (4) 高圧蒸気滅菌、又はEOG滅菌にて滅菌する。

例) 高圧蒸気滅菌推奨条件

温度	時間	気圧
121℃	20分以上	98.067kPa

2. 使用者による保守点検事項

本品が漂白剤、消毒液等の塩素及びヨウ素溶液に曝された場合、直ちに清水で洗浄すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者・製造業者

ユフ精器株式会社

〒113-0034

東京都文京区湯島2丁目31番20号

TEL: 03-3811-1131

FAX: 03-3811-1727