

機械器具 25 医療用鏡


一般医療機器 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 38818000

ウィングリトラクター

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

ウィングリトラクター 5 mm

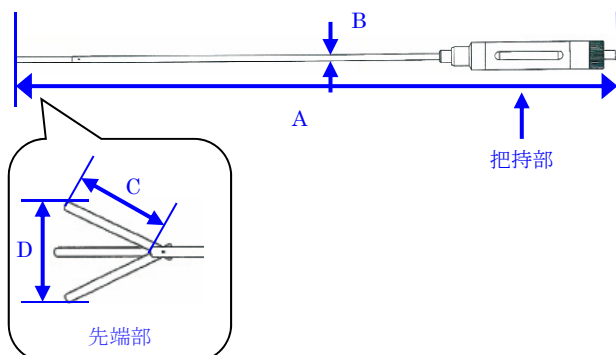

商品コード	全長 A(mm)	直径 B(mm)	先端部の長さ C(mm)	最大開時の幅 D(mm)
K-WR005	510.0	5.0	48.0	50.0

2. 原材料（接触部の組成）

ステンレス鋼

3. 動作原理

本品は、トロカールスリーブ（一般汎用品）を通して体腔内に挿入し、先端部を開いて組織を圧排する。

【使用目的又は効果】

本品は、内視鏡治療時に内視鏡とともに使用する器具で、組織の圧排に用いるものである。本品は再使用可能である。

【使用方法等】

1. 使用前の確認

本品が十分に洗浄、滅菌されていることを確認する。

2. 準備・操作

- (1) 先端部が閉じた状態で 5 mm 以上のトロカールスリーブ（一般汎用品）を通して体腔内に挿入する。
- (2) 把持部で先端部を操作し、組織を圧排する。
- (3) 先端部を閉じてから引き抜く。

3. 使用後

【保守・点検に係る事項】1 に示すように速やかに洗浄し、乾燥させ、滅菌して保管する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品は未滅菌品であるので、必ず適切な滅菌を行い、滅菌されたことを確認してから使用すること。
- (2) 使用前に、破損・変形亀裂・傷・磨耗がないか、適切に機能するかどうかを点検すること。破損等が確認された場合は使用しないこと。
- (3) 先端部を抜き取る際は、組織を挟み込まないように注意すること。

- (4) 破損、曲がり等の原因になり得るので使用時には必要以上の力を加えないこと。
- (5) 使用後は、表面に付着している血液、体液、組織片及び薬品等が乾燥しないよう直ちに洗浄すること。その際、可動部は汚れが落ちやすいように開いた状態で洗浄すること。
- (6) 弱アルカリ・弱酸性洗剤・消毒剤は、本品を腐食させる恐れがあるため使用しないこと。
- (7) 金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、表面が損傷するので使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

清潔な場所に室温で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄・滅菌方法

- (1) 分解できる部分は分解し、水洗いして付着物を取り除く。
 - (2) 石鹼、又は医療用中性洗剤等を用い、柔らかいブラシ、スポンジ等で軽くこすり洗いをする。
 - (3) 蒸留水または脱イオン水を用い、よくすすぎ、乾燥させる。
 - (4) 高压蒸気滅菌、又は E O G 滅菌にて滅菌する。
- 例) 高压蒸気滅菌推奨条件

温度	時間	気圧
121℃	20 分以上	98.067kPa

2. 使用者による保守点検事項

本品が漂白剤、消毒液等の塩素及びヨウ素溶液に曝された場合、直ちに清水で洗浄すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者・製造業者

ユフ精器株式会社

〒113-0034

東京都文京区湯島 2 丁目 31 番 20 号

TEL : 03-3811-1131

FAX : 03-3811-1727