


機械器具 38 医療用鉤

一般医療機器 鉤 35105000

ランゲンベック扁平鉤

【形状・構造及び原理等】*

1. 形状*

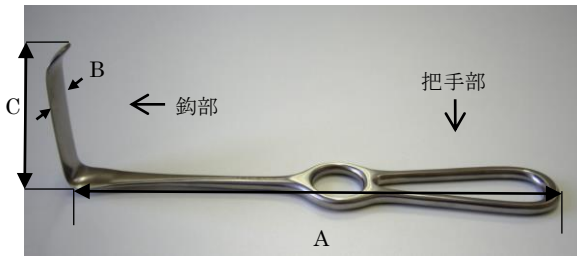

商品名	商品コード	規格	全長 A(mm)	幅 B(mm)	深さ C(mm)
ランゲン ベック 扁平鉤	HF-2381	10×25mm	210.0	10.0	25.0
	HF-2382A	13×40mm		13.0	40.0
	HF-2382B	13×60mm		13.0	60.0
	HF-2383A	18×40mm		18.0	40.0
	HF-2383B	18×60mm		18.0	60.0
	HF-2383C	18×85mm		18.0	85.0
	HF-2384A	25×60mm		25.0	60.0
	HF-2384B	25×85mm		25.0	85.0
	HF-2383560	35×60mm		35.0	60.0
	HF-2382528	25×28mm		25.0	28.0
	HF-23830100	30×100mm		30.0	100.0
	HF-2401475	足長 大 14×75mm		14.0	75.0
	HF-2401060	足長 小 10×60mm		10.0	60.0
	HF-2401748	普通 大 17×48mm		17.0	48.0
	HF-2401550	普通 小 15×50mm		15.0	50.0
	HF-2401327	甲状腺 13×27mm		13.0	27.0
	HF-2400740	カテ用 7×40mm		7.0	40.0
	HF-2400618	心筋 6×18mm		6.0	18.0
HF-2402870	中扁平 28×70mm	28.0	70.0		
HF-24043150	特大扁平 43×150mm	43.0	150.0		
HF-2401525	扁平筋 小 15×25mm	15.0	25.0		

2. 原材料(接触部の組成)

ステンレス鋼

3. 動作原理

鉤部を術野に差し入れ、把手部を操作することにより組織を牽引又は圧排し、視野を確保する。

【使用目的又は効果】

本品は、軸様のハンドルをもつ手術器具である。創口、術野を覆う組織を牽引又は圧排し、視野を確保するために用いる。

【使用方法等】

1. 使用前の確認

本品が十分に洗浄、滅菌されていることを確認する。

2. 準備・操作

鉤部を術野に差し入れ、把手部を操作することにより組織を牽引又は圧排する。

3. 使用後

【保守・点検に係る事項】1に示したように洗浄、滅菌する。

【使用上の注意】**

1. 重要な基本的注意**

- (1) 本品は、未滅菌品であるので、必ず適切な滅菌を行い、滅菌されたことを確認してから使用すること。
- (2) 使用前に、破損・変形亀裂・傷・磨耗がないか、適切に機能するかどうかを点検すること。破損等が確認された場合は使用しないこと。
- (3) 破損、曲がり等の原因になり得るので使用時には必要以上の力を加えないこと。
- (4) 金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は、表面が破損するので使用しないこと。
- (5) 本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感染予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。
- (6) 本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。

【保管方法及び有効期間等】

清潔な場所に室温で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄・滅菌方法

- (1) 水洗いし、付着物を取り除く。
- (2) 石鹼、又は医療用中性洗剤等を用い、柔らかいブラシ、スポンジ等で軽くこすり洗いをする。
- (3) 蒸留水または脱イオン水を用い、よくすすぎ、乾燥させる。
- (4) 高圧蒸気滅菌、又はEOG滅菌により滅菌する。

例) 高圧蒸気滅菌推奨条件

温度	時間	気圧
121℃	20分以上	98.067kPa

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者・製造業者

ユフ精器株式会社

〒113-0034

東京都文京区湯島2丁目31番20号

TEL : 03-3811-1131

FAX : 03-3811-1727