

2021年6月10日

製造販売届出番号13B3X00065A00005

J M D N :11950000

一般医療器

類別 機械器具(14) 打診器


一般的名称 打診器

販売名 打診器 (ハンマー)

文書番号A-3

【形状・構造及び原理等】

- 1) 本品はヘッド、ハンドルから成る(右記を参照)
ヘッドはゴムラバー製
ハンドルは亜鉛合金製
(知覚計付きのタイプも含む)
- 2) 形状
本添付文書に該当する製品の製品名、サイズ等については包装表示ラベルに記載されているので確認する事。
- 3) 原理
ハンドルを持ちゴム部で各部位を叩いて反応を見る

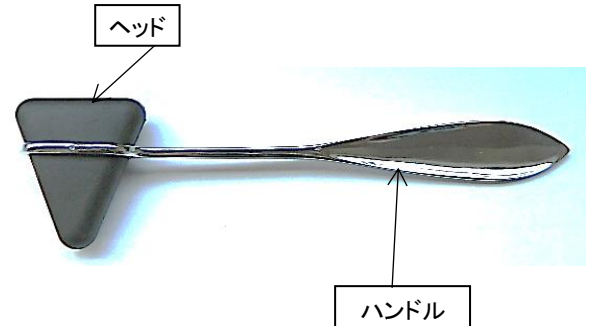

代表図

【使用目的又は効果】

本品は身体の反射に用いる

【使用方法等】

ハンドルを軽く持ち、ヘッドを身体の目的部分に手首を利用して叩いて、反射、反応をみる。
(知覚計付は、ピン、はけで知覚異常を調べる)

【使用上の注意】

1. 本品は打診以外に使用しないで下さい。
2. 本品は、使用するために必要な知識、技術に習熟した医師が使用するように設計されていますので、十分に注意して使用のこと。
3. 使用する前に必ず各部が正常であることを確認してください。
4. 本品は天然ゴムを使用しています。天然ゴムは、かゆみ、発疹、むくみ、発熱、呼吸困難、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状を起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。
5. 本品にはピンが付いている物もありますので、十分に注意して使用の事。
6. 塩素系、ヨウ素系の消毒剤が付着した時は水洗いし、ふき取ること。

【保管方法及び使用期間等】

1. 常温の室内にて保管
2. 使用期間について、3年以内(自己認証)又は、材質の変色、破損、及び不具合等があった場合は使用できません。

【保守・点検に関わる事項】

1. 打診器は繰り返し使用される器具ですので、衛生上及び安全上適切な管理を行うこと。
2. 使用前には、必ず点検してから使用すること。
3. 本品は未滅菌です。使用前に適切な処置をすること。
4. ゴム部のひび割れ、老化した場合は使用できません。

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所】

ユーメド貿易株式会社(製造販売業者)
〒111-0042
東京都台東区寿1-11-11 杉山ビル
TEL: 03-5830-3495 FAX: 03-5830-3496