


類 別 機械器具 22 検眼用器具
一般的名称 瞳孔計
販 売 名 万能瞳孔計

文書番号A-28

【形状・構造など】

アルミニウム製、シルバー色
長さ 170mm 幅 30mm

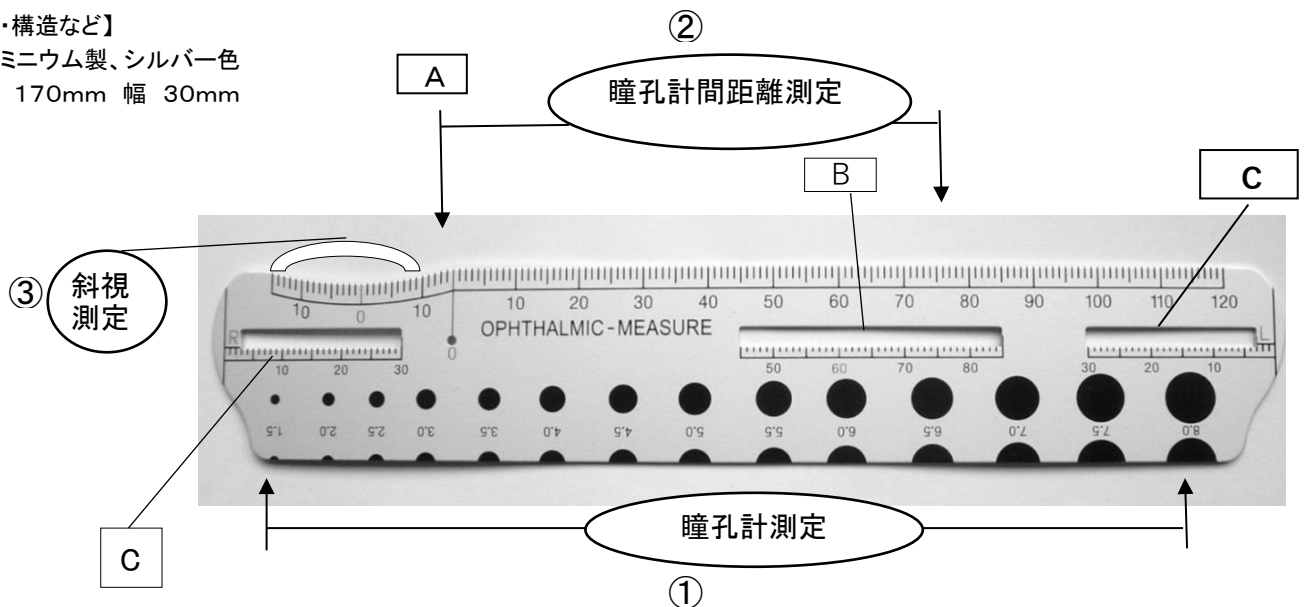

【使用目的又は効果】

瞳孔の幅又は径を測定するために用いる。

【保管方法及び使用期間等】

本品は高温、高湿をさけ室温にて保管する事。
使用期間は3年間(自己認証)

【使用方法等】

- ①瞳孔計測定は、本体の1.5mm～8.0mmを対象となる瞳孔の径と合わせてその数値を測定する。
- ②瞳孔間の距離は 上記の Aに右の瞳孔をあわせ Bの角穴に左目の瞳孔をあわせ計測する。
- ③斜視測定は、NO.3 の上に瞳孔をあわせ瞳孔を動かして斜視の傾向をみる。
- 4 .眼球高測定は、C の角穴に眼球を側面から見て測定する。

【保守・点検に関わる事項】

1. 本製品は、日常点検し器具は正常に使用できることを確認する事。
2. 汚れ等を付着したままにしない事。
必ず水で洗い拭取る事。

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所】

ユーメド貿易株式会社(製造販売業者)
〒111-0042 東京都台東区寿1-11-11 杉山ビル
TEL: 03-5830-3495 FAX: 03-5830-3496

【使用上の注意】

1. 本品は目的以外の使用は禁止。
2. 器具を角膜及び眼球に触れない事。
3. 薬品、アルコール類などを使用しないこと。
4. 汚れ等は水で洗い、拭取る事。
5. 本品を曲げたり、変形させない事。