

類 別 機械器具(18)血圧検査又は脈波検査用器具
一般の名称 アネロイド式血圧計
販 売 名 ADラージゲージ血圧計 ワンハンド型

文書番号 A-27

【形状・構造及び原理等】 *右図参照

- ① 腕帯 : ナイロン製及びマジックテープ、140x500mm
- ② ゴム袋 : ラテックス製、袋部とチューブ部
- ③ メーター : 強化プラスチック製 20~300mmHg、120g
- ④ エンドバルブ : プラス製 エアを入れて、逆止する
- ⑤ エアーバルブ : 樹脂製、ノブタイプ、エアーを排気する
- ⑥ ゴム球 : ラテックス製

全体の重量: 約 252g

形状については、本添付文書に該当する製品の製品名、タイプについては包装表示ラベルに記載されているので確認の事。

(原理)

カフを加圧して減圧してコロコフ音を聴診器で最高血圧、最低血圧を測定する。



接続した状態

【使用目的又は効果】

非観血式聴診法による人体の血圧値測定
(測定には聴診器が必要です)

【使用方法等】


1. 各部の接続が正しい事を確認する。
2. 腕帯を腕に巻きとめる。
3. プッシュレバーバルブを上側の位置にする。
4. ゴム球で加圧する。
5. 300mmHg以上は絶対に加圧しない事。
6. プッシュレバーバルブを人差し指でゆっくりと引きながら、最高値と最低値を測定する。
7. 測定後プッシュレバーバルブを下側まで引いてエアーを排気する。

プッシュレバーバルブの位置

加圧して測定時


上側の位置

ここに人差し指をかけて
ゆっくりと人差し指で引いて排気する、
排気速度は引くほど速くなる。

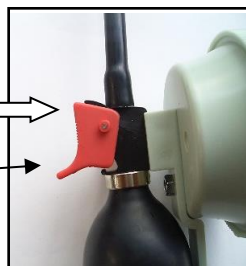

下部の位置

このレバーを下側まで引いてエアーを
排気する。

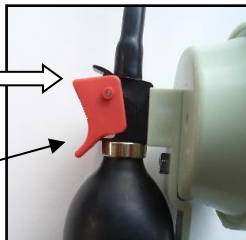測定する時は上側まで戻して下さい

【使用上の注意】

1. 本製品は、使用するために必要な知識、技術を習得した医療従事者が使用するように設計されていますので、十分に理解して使用の事。
2. 300mmHg以上に加圧するとメーター一部が破損し精度に狂いが生じますので、絶対にしない事。
3. 付属の腕帯は標準成人用です。それ以外に肥満用、小児用、幼児用とありますので、それぞれに合った腕帯を使用して下さい。
4. 本製品に血液等が付着した場合は使用しないで、必要な部品交換して下さい。
5. 本製品は天然ゴムを使用しておりますので、ゴムアレルギーの可能性あります。アレルギー性症状を起こした場合は、ただちに使用を中止し、医師に相談して下さい。
6. 必要に応じて部品交換をしてください。

【保管方法及び使用期間等】

本製品は、高温、高湿を避け、ちりやほこりのない室内で保管して下さい。

使用期間について、3年以内(自己認証)又は必要に応じて部品交換を行うこと。ゴムは早いと1年以内でも老化します又エアーバルブの中にもゴムを使用しています。

【保守・点検に関わる事項】

1. 本製品は、日常点検し器具が正常に機能することを確認する事。
2. 本製品のメーター一部は定期的に精度を点検する事。
3. ゴム部品は長時間使用すると劣化、亀裂等を起こしますので交換する事。

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所】

ユーメド貿易株式会社(製造販売業者)

〒111-0042 東京都台東区寿1-11-11 杉山ビル

TEL: 03-5830-3495 FAX: 03-5830-3496