

2021年6月10日

製造販売届出番号： 13B3X00065ADC007
J M D N : 70564000
一 般 医 療 器

類 別 機械器具（06）呼吸補助器
一般的名称 人工呼吸器用マスク
販 売 名 ポケットマスク Adsafe

文書番号A-32

【禁忌・禁止】

- 1. 一方向弁の再使用禁止
- 2. フィルターの再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

右図を参照

マスククッション : 塩化ビニル樹脂
マウス : 硬質プラスチック製
大きさ : 130mm×106mm×48mm
原理 : 口と鼻を覆うマスク



全体図

マウスピースを上押し上げた状態

【使用目的又は効果】

患者の鼻、口を覆って人工呼吸をおこなう。

【使用方法等】

- 1. ケースよりマスクを取り出す。
- 2. マスククッションを広げて、フィルターの位置を確認する。
- 3. 大人、小児に使用する時はマスクのふちに顎と口下を合わせ、
"nose"のマークが鼻の上にセットしてピッタリと密着させる。
- 4. マウスピースより息をゆっくりと吹き込み、胸が上がる事を注視する。
- 5. マウスピースより口を離し患者が息を吐き出すようにする。
この動作を繰り返す。
(この時の注意：もし患者が異物を吐いたらマスクをはずし、
きれいにすること。)
- 6. 必要に応じて付属しているニトリル製グローブを使用する(非医療機器)
- 7. 幼児に使用する場合はマスクを大人とは逆にフェイスにセットする。

【使用上の注意】

- 1. 十分に訓練した医療従事者が行う事。
- 2. 医療従事者より適切な指導を受けた人以外は使用できません。
- 3. 酸素を使用する場合は、その注意事項に従って遵守すること。
- 4. 一方向弁とフィルターはシングル使用であって、再使用はできません。
- 5. 事前に動作をしてみる事そして各部分が異常がない事を確認する事。

【保管方法及び使用期間等】

作動環境： -18℃ ～ 40℃
湿度 ～85%

保管環境： 作動環境と同等

使用期間について、3年以内（自己認証）又は
材質の変色、破損、及び不具合等があった場合。

【保守・点検に関わる事項】

マスクを洗浄する時は、薄い石鹸水で洗い、きれいな水でよくすすぎ、異物などが無い事を認めてから良く乾燥する。

【洗浄についての注意事項】

煮沸、ガス滅菌、オートクレーブは使用できません。

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所】

ユーメド貿易株式会社(製造販売業者)
〒111-0042 東京都台東区寿1-11-11 杉山ビル
TEL: 03-5830-3495 FAX: 03-5830-3496
mail : info@adscope.co.jp

一度使用したポケットマスクは使用できません