

2021年6月10日

製造販売届出番号: 13B3X00065ADC008

J M D N : 70095000

一般医療器

類別 機械器具(22)検眼鏡器具
一般的名称 検眼鏡診断セット
販売名 ADCポケット診断セット

文書番号A-8

【形状・構造など】

1. 検眼鏡 ヘッド部

樹脂製本体、補助レンズ、
電球、キセノン 2.5v 1.65w 0.660amp
単品の場合; 検眼鏡 番号 5112N

2. 検耳鏡 ヘッド部

樹脂製本体、光学拡大レンズ
電球、キセノン 2.5v 1.65w 0.660amp
スペキュラ 樹脂製
2.75mm (5182)
4.25mm (5185)
単品の場合; 検耳鏡 番号 5111N

3. ハンドル部

合金、樹脂コート

ハンドルは検眼、検耳鏡に共通して使用できます。

ADC-5110N 検耳鏡・検眼鏡セット



【使用目的又は効果】

直像検眼鏡及び耳鼻鏡の観察に使用する。

【品目仕様】

電池 単3乾電池2本を使用する。
光源のランプ仕様は2.5v (専用ランプ 5112N-4)
補正レンズの範囲 -20D - +20D (ジオプター)

【使用方法等】

1. 検眼鏡

検査に必要な口径アパチャーと、補正レンズを合わせて
直像を観察する。

2. 検耳鏡

検査に必要なスペキュラを取り付ける。
スペキュラは患者一人用とする。

3. 本品は滅菌などはできません。

- 長時間使用しない場合は電池をハンドルより出してください。
- 電池の容量が低下すると適切な光源をえられないので、電池を交換してください。
- 本体(ハンドル、ヘッド)が汚れたら、速やかに取り除くこと。
- ヘッド部、ハンドル部は水分等は厳禁です。
- 改造、分解はできません。

【保管方法及び使用期間】

室内にて、汚れ等が付着しない場所で保管してください。
使用期間は5年以内(自己認証)

【保守・点検に関する事項】

ハンドル部、ヘッド部の汚れは、エタノール液にて取り除いて、
水を含んだ布などできれいにします。レンズは乾拭きする、必要に
応じてレンズクリーナーを使用してください。

【使用上の注意】

- ハンドル部のスイッチは常時オフにする事。
- この医療機器は医療従事者しか使用できません。
- 検眼鏡の使用については、この器具の操作の経験者、操作を
熟知した医師以外の使用はできません。
- スペキュラは1人用です、使用後は適切に破棄してください。

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所】

ユーメド貿易株式会社(製造販売業者)
〒111-0042 東京都台東区寿1-11-11 杉山ビル
TEL: 03-5830-3495 FAX: 03-5830-3496