

2021年6月10日

製造販売届出番号: 13B3X00065ADC009

J M D N : 41238000

一 般 医 療 器

類 別 機械器具(02) 医療用照明器
一般的名称 耳照明器
販 売 名 ADCオトスコープ

文書番号 A-7

【形状・構造及び原理等】

ヘッド部 合金、プラスチック樹脂、レンズ
ハンドル部 合金メッキ仕上げ
スペキュラ部 ポリプロピレン
電池 単2乾電池 2個 (別売り品)
電球 タングステン球 2.5v (5211-4)

ヘッド部 合金、プラスチック樹脂、レンズ
ハンドル部 合金メッキ仕上げ

スペキュラサイズ (リユーザブルタイプ)

- 2. 5mm (5211-1)
- 3. 5mm (5211-2)
- 4. 5mm (5211-3)

原理等

スペキュラを利用して光源にて耳の外部、内部を観察する。

【使用目的又は効果】

耳道の照明に使用する。

本体ハンドル部とスペキュラ部「開孔器」による器具である

【使用方法等】

1. 適切なスペキュラを選んでヘッド部に回してセットする。
2. ハンドル部に電池(単2乾電池2ヶ)を+面より本体ハンドル部に入れ、蓋を止まるまで締める。
3. スイッチ(白色)を押し回して適度な照明にする。
に入れ、蓋を止まるまで締める。

【使用上の注意】

1. 本品は医療従事者用ですので他の者は使用できません。
2. スペキュラは使用前に洗浄、消毒、又は必要に応じて滅菌して使用する。
3. ヘッド部、本体部などの分解、改造はしないで下さい。

【保管方法及び使用期間等】

1. 室内にて、汚れ等が付着しない場所で保管
2. 使用期間について、5年以内(自己認証)
必要に応じて部品交換を行うこと。



ADC-5211



ディスポ用アダプター

上記アダプターを外し、付属のスペキュラを装着して使用してください。

【保守・点検に関わる事項】

ハンドル部、ヘッド部の汚れは、エタノール液にて取り除いて、水を含んだ布などできれいにする。
レンズは、乾拭きにてきれいにする、必要に応じてレンズクリナーを使用してください。
スペキュラの滅菌は、オートクレーブにて、121° 20分で行って下さい。

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所】

ユーメド貿易株式会社(製造販売業者)
〒111-0042 東京都台東区寿1-11-11 杉山ビル
TEL: 03-5830-3495 FAX: 03-5830-3496