

類 別	機械器具(15)舌圧子
一般的名称	舌圧子
販 売 名	バイトスティック

A-25

【形状・構造など】

右図を参照

1. 材質

ポリ塩化ビニル

2. 形状

長さ 110mm 幅 23mm 厚み 11mm

重さ 約 12g



【使用目的】

舌を移動させて、周辺臓器及び組織の検査を安易にするために用いる手術器具である。

製品番号 ADC4010T

【使用方法】

必要に応じて次のように使用して下さい

1. 本品をもち、厚みの薄い方を目的に応じて舌を圧迫、圧定又は移動させる。
2. 開口する場合は、厚みのある方を奥歯に差し込む。
3. バイトブロックとして使用する場合は、厚みのある方を使用する。

【貯蔵方法】

本製品は、直射日光を避け、常温の室内で保管すること。

【保守・点検に関わる事項】

可燃性の物と一緒に保管しないこと。
有機溶剤、化学薬品等とは必ず避けて保管のこと。

【使用上の注意】

1. 本製品は、使用するために必要な知識、技術に習熟した医師が使用するように設計されていますので、充分理解して使用のこと。
2. 本製品は未滅菌のため、必要に応じて滅菌処理を行なって下さい。滅菌する場合は、EOガス滅菌が可能です。
3. 本製品の使用前に、変形、傷等がないか、先端部に異常がないか等、必ず確認の上使用して下さい。
4. 本品は一人の患者に使用して下さい、使用后適切に破棄する事。
5. 本品はポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ-2-エチルヘキシルが溶出するおそれがあるので注意する事。
6. 本品を切削、溶解、打刻などの二次的加工の禁止。
7. 有機溶剤の使用禁止。

【包 装】

1個（バラ、ビニール包装）

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所】

ユーメド貿易株式会社（製造販売業者）
〒111-0042 東京都台東区寿1-11-11 杉山ビル
TEL: 03-5830-3495 FAX: 03-5830-3496