

2021年6月10日

製造販売届出番号: 13B3X00065B00003

J M D N : 12726010

一 般 医 療 器

類 別 機械器具(30)結紮器及び縫合器
一般的名称 持針器
販 売 名 持針器


文書番号A-11

【形状・構造など】

材質: SUS410 ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本製品は縫合針を把持するためにもちいる。

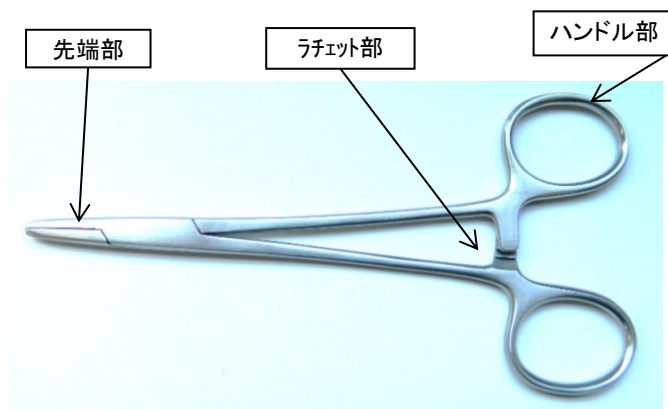

代表図

【使用方法等】

ハンドル部を持ち操作することにより、先端部を開閉させ針を把持する。

【使用上の注意】

1. 本製品は、使用するために必要な知識、技術に習得した医師が使用するように設計されていますので、十分に注意して使用の事。
2. 本製品は未滅菌の為、使用前に必ず洗浄、滅菌すること。
3. 本製品の使用前に、変形、傷がないか、先端部が開閉できるか等、確認の上使用の事。
4. 本製品の能力以上の物を把持しない事。
5. 本製品で、骨やチューブを把持しないこと、損傷します。
6. 電気メスを用いた接触凝固は使用しない。
7. 塩素系、ヨウ素系の消毒剤が付着した時は水洗いすること。
8. 磨き粉、金属たわし類の使用禁止。

【保管方法及び使用期間等】

室内(常温)にてケース等に入れて保管する。
使用期間は3年間(自己認証)

【保守・点検に関わる事項】

1. 本製品は、日常点検し器具は正常に機能する事を確認すること。
2. 使用後は表面に付着している全ての物体、液体等を乾燥しないうちに取除くこと。
3. 洗浄後は直ちに乾燥させること。
4. 使用する水は蒸留水でして下さい。
5. 水溶性潤滑油を塗布すること。
6. 使用を重ねることにより受ける、反復的な応力により金属疲労に曝されるため、疲労が見られる場合は、直ちに交換して下さい。

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所】

ユーメド貿易株式会社(製造販売業者)
〒111-0042 東京都台東区寿1-11-11 杉山ビル
TEL: 03-5830-3495 FAX: 03-5830-3496