

2021年6月10日

製造販売届出番号： 13B3X00065B00004

J M D N : 35325001

一般医療器


類別 機械器具(35)医療用はさみ
一般的名称 はさみ
販売名 はさみ（剪刀）

文書番号A-12

【形状・構造など】

材質：ステンレス鋼 SUS420

形状：本添付文書に該当する製品の部分名、製品番号等については包装表示ラベルに記載されているので確認する事。

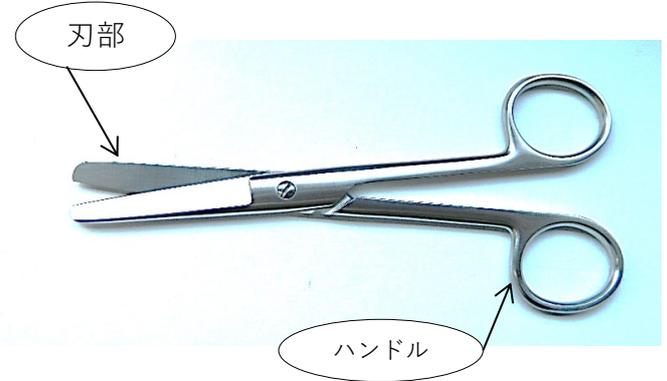

代表図

【使用目的又は効果】

外科等、診察、診療、手術など際に組織、布、縫合糸等の切断に使用する。

【使用方法等】

ハンドル部を持ち、刃部の開閉によって切断する。

【使用上の注意】

1. 本製品は、使用するために必要な知識、技術に習得した医師が使用するように設計されていますので、充分注意して使用の事。
2. 本製品は未滅菌の為、使用前に必ず洗浄、滅菌を施すこと。
3. 本製品には2枚の刃がついていますので、取扱いには充分注意して使用してください。（又先端には尖った部分もあります）
4. 本製品の使用前に、変形、傷などがないか、刃部が開閉できるか等、確認の上使用のこと。
5. 本製品の能力以上の(大きい、硬い)物を切断すると損傷します。
6. 塩素系、ヨウ素系の消毒剤は付着した時は水洗いして下さい。
7. 磨き粉、金属たわし類の使用禁止。

【保管方法及び使用期間等】

本製品は、高温、高湿、を避け、塵やほこりのない清潔な場所に貯蔵、保管して下さい。

使用期間は3年間（自己認証）

【保守・点検に関わる事項】

1. 本製品は、日常点検し器具は正常に機能する事を確認する事。
2. 使用後は表面に付着している全ての物体、液体等を乾燥しないうちに取除くこと。
3. 洗浄する水は蒸留水でして下さい。
4. 洗浄後は直ちに乾燥すること。
5. 洗浄後は必ず水溶性潤滑油を塗布すること。
6. 使用を重ねることにより受ける、反復的な応力により金属疲労に曝されるため、疲労が見られる場合は、直ちに交換して下さい。

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所】

ユーメド貿易株式会社(製造販売業者)

〒111-0042 東京都台東区寿1-11-11 杉山ビル

TEL: 03-5830-3495 FAX: 03-5830-3496