

2021年6月10日

製造販売届出番号: 13B3X00065B00005

J M D N : 35079001

一 般 医 療 器

類 別 機械器具(36)医療用ピンセット

一般的名称 ピンセット

販 売 名 ピンセット

文書番号 A-13

【形状・構造など】


本製品はステンレス鋼 SUS310、SUS410を用いている。

先端部は無鉤、有鉤とがある。(右図参照)

長さは 7.5cm ～ 23.0cm

形状について、

本添付文書に該当する製品名、製品番号等については、
包装表示ラベルに記載されているので確認する事。

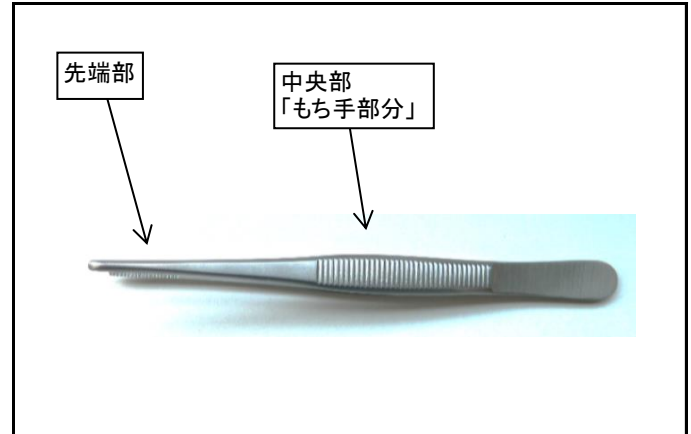

代表図

【使用目的又は効果】

診察の際に皮膚や組織、異物等を挟み、又は把持するために用いる。

【使用方法等】

中央部を持ち目的に応じて、先端部を閉じて使用する。

【保管方法及び使用期間等】

1. 保管
室内(常温)にてケース等にに入れて保管する。
2. 使用期間
3年間(自己認証)

【使用上の注意】

1. 本製品は、使用するために必要な知識、技術に習熟した医師が使用するよう設計されていますので、充分注意し使用の事。
2. 本製品は未滅菌の為、使用前に必ず洗浄、滅菌を施すこと。
3. 本製品の使用前に、変形、傷がないか、先端が把持できるか等、確認の上使用のこと。
4. 本製品の能力以上の使い方をすると、折損することがあります。
5. 電気メスを用いた接触凝固は使用しない。
6. 塩素系、ヨウ素系の消毒剤が付着した時は水洗いして下さい。
7. 磨き粉、金属たわし類の使用禁止。

【保守・点検に関わる事項】

1. 本製品は、日常点検し器具が正常に動く事を確認すること。
2. 使用後は表面に付着している全ての物体、液体等を乾燥しないうちに取除くこと。
3. 洗浄後は直ちに乾燥すること。
4. 使用する水は蒸留水でして下さい。
5. 水溶性潤滑剤を塗布すること。
6. 使用を重ねることにより受ける、反復的な応力により金属疲労にさらされるため、疲労が見られる場合は、直ちに交換して下さい。

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所】

ユーメド貿易株式会社(製造販売業者)

〒111-0042 東京都台東区寿1-11-11 杉山ビル

TEL: 03-5830-3495 FAX: 03-5830-3496