

2021年6月10日

製造販売届出番号:13B3X00065B00006

J M D N : 10861001

一般医療器

類別 機械器具(39)医療用鉗子  
一般的名称 鉗子  
販売名 鉗子

文書番号A-14

#### 【形状・構造など】

##### 1. 材質

ステンレス鋼 SUS410

##### 2. 形状


モスキート型 12.5cm 無鉤・有鉤

ペアン型 14.5 ～ 18.5cm 無鉤

コッヘル型 14.5 ～ 18.5cm 有鉤

その他の鉗子 9.0 ～ 28.0 cm

本添付文書に該当する製品の製品名、サイズ等については  
包装表示ラベルに記載されているので確認すること。

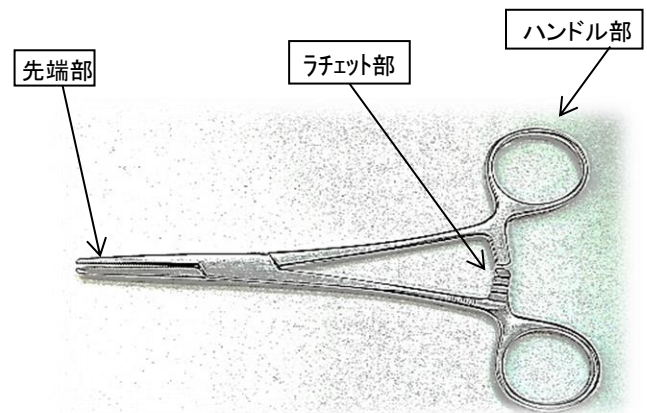

#### 【使用目的又は効果】

本製品は臓器、病変組織、異物等を把持、圧迫又は支持する  
ために用いる。

代表図

#### 【使用方法等】

ハンドル部を持ち操作することにより先端部が開閉させ、ラチェット部  
で目的に応じて、把持、圧迫又は支持してとめる。

#### 【保管及び使用期間等】

本製品は、高温、高湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に  
貯蔵、保管してください。

使用期間は3年間(自己認証)

#### 【使用上の注意】

1. 本製品は、使用するために必要な知識、技術に習得した医師が  
使用するように設計されていますので、充分注意して使用の事。
2. 本製品は未滅菌の為、使用前に必ず洗浄、滅菌を施すこと。
3. 本製品の使用前、変形、傷がないか、先端部が開閉できるか  
等、確認の上使用の事。
4. 本製品の能力以上の(大きい、硬い)物を把持すると損傷します。
5. 本製品で、骨やチューブを把持しないこと、損傷します。
6. 電気メスを用いた接触凝固は使用しない。
7. 塩素系、ヨウ素系の消毒剤が付着した時は水洗いすること。
8. 磨き粉、金属たわし類の使用禁止。

#### 【保守・点検に関わる事項】

1. 本製品は、日常点検し器具は正常に機能する事を確認すること。
2. 使用後は表面に付着している全ての物体、液体等を乾燥しない  
いちに取除くこと。
3. 洗浄後は直ちに乾燥させること。
4. 使用する水は蒸留水でして下さい。
5. 水溶性潤滑油を塗布する事。
6. 使用を重ねることにより受ける、反復的な応力により金属疲労に  
曝されるため、疲労が見られる場合は、直ちに交換して下さい。

#### 【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所】

ユーメド貿易株式会社(製造販売業者)

〒111-0042 東京都台東区寿1-11-11 杉山ビル

TEL: 03-5830-3495 FAX: 03-5830-3496