

類別 機械器具 (38) 医療用鉤  
一般的名称 鉤  
販売名 鉤

**【形状・構造及び原理等】**

代表図

## 1. 形状

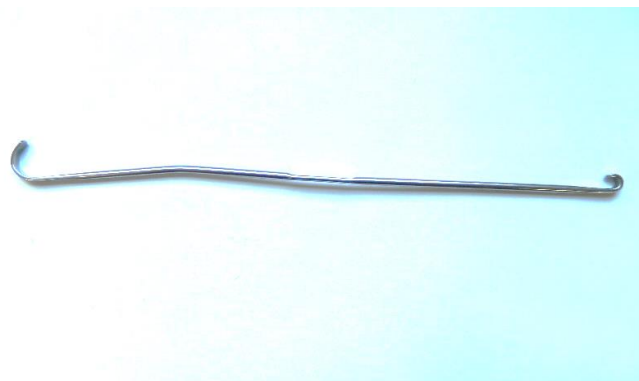
本品は、右図の形状になっているが、サイズ、形状などに違いがあるので、記載されている製品名、品番、サイズ等を確認する事。

## 2. 材質

ステンレス鋼

## 3. 原理

ハンドル部にて創傷部や術部などを拡げる。

**【使用目的又は効果】**

本品は軸様のハンドルをもつ手術器具で、手術中の創傷部、術部などを覆う組織あるいは筋肉などを拡げる。

**【使用方法等】**

本品の中央部又は適当な部分を持ち先端部にて手術操作を行う。

本品は未滅菌ですので、必ず洗浄、滅菌を行ってください。

**【保守・点検に係る事項】**

滅菌については、医療機関、医療従事者のもと行ってください。

滅菌条件(オートクレーブ)

温度	時間
121℃	15分
126℃	10分
134℃	3分

**【使用上の注意】**

1. 使用前に必要な洗浄、滅菌をすること。
2. 本品は、使用する為に必要な知識、技術に習得した医療従事者が使用すること。
3. 本品を使用目的以外で使用しないでください。  
過度の力は変形のもとになりますので、必要以上の力をかけない事。

1. 使用後に本体面に付着している全ての物質、液体等を取り除くこと。
2. 腐食、機能低下の恐れがある物質、液体、溶剤の使用禁止。
3. 使用前の点検で、異常な作動、変色、変形など異常等あれば使用できません。
4. 先端部は歯状になっているので必ず点検すること。

**【保管方法及び有効期間等】**

1. 十分に洗浄、乾燥して室内の適切なところに保管する。
2. 使用期間は、適切な使用前点検、使用後の手入れ、貯蔵、保管等、行った場合は3年です(自己認証)

**【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所】**

ユーメド貿易株式会社 (製造販売業者)  
〒111-0042 東京都台東区寿1-11-11 杉山ビル  
TEL: 03-5830-3495 FAX: 03-5830-3496