

医療用品04 整形用品
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ(JMDNコード:35531000)

ディスポーザブル CIVCO ドレープ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

「使用方法」

- * 1. 使用後の製品を再滅菌し、再使用を行わないこと。【無菌性保証の担保ができない】

【形状・構造及び原理等】

1. 寸法

型番	寸法
610-870	81.3×91.4cm

【使用目的又は効果】

- 1. 使用目的
手術室やカテーテル処置室の汚染(器具やテーブルの上)から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布製の用具をいう。本品は患者を手術中の熱、炎又は他の形態のエネルギーから保護するためにも使用する。本品は単回使用である。

【使用方法等】

- 1. 使用方法
 - (1) 無菌操作にて本品を包装から取り出す。
 - (2) マーキングがついている縁を上側にして本品を広げ、切り込み側のタブを破る。
- * (3) 切り込み側が患者に向けて開くように、ステッパ(別売)の上に本品を置く。
- * (4) トランスデューサー(別売)の下にテープで固定する。
- * (5) 対になっている本品の穴とブラキセラピー用テンプレート(別売)の台の穴とを合わせる。
- * (6) ブラキセラピー用テンプレート(別売)の位置を固定させた後、本品の位置調整を行う。

【使用上の注意】

- 1. 重要な基本的注意
 - (1) 外科開口部、損傷部位に接触させないこと。
 - (2) 高熱を発するもの、火気に接触させないこと。
- 2. 不具合・有害事象
 - (1) その他の不具合・有害事象
 - 1) ミシン目の成形不良
- 3. その他の注意
 - (1) 以下の条件にて保管することを推奨する。
保管温度: 11-29℃
その他: 多湿、直射日光および水濡れを避け、清潔な換気のよい場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

TEL

Website

** 製造業者

輸入先国名

Euro Medi Tech

ユーロメディテック株式会社

03-5449-7585

www.euro-meditec.co.jp

CIVCO Medical Instruments Co., Inc.
DBA CIVCO and CIVCO Medical
Solutions

シブコ メディカルインスツルメンツ コー
インク ディービーイー シブコ アンド
シブコ メディカル ソリューションズ

アメリカ合衆国