

機械器具 12 理学診療用器具

一般医療機器 弾性ストッキング (31724000)

MEP用弾性ストッキング モニフィット

再使用禁止

【警告】

適用対象（患者）

以下の患者には予想されるリスクを勘案して、効果がリスクを上回ると判断した上で慎重に使用してください。

- ・動脈血行障害、うっ血性心不全及び装着部位に炎症性疾患、化膿性疾患、創傷のある患者
[圧迫により症状を悪化させる恐れがあるため]
- ・装着部位に神経障害のある患者
[血行障害を起こしても認識できない恐れがあるため]
- ・糖尿病疾患患者
[無症状の神経障害や血行障害を併発している恐れがあるため]
- ・繊維に対して過敏症のある患者
[接触性皮膚炎を起こす恐れがあるため]

使用方法

医師が必要と認める場合を除き、就寝時は着用しないこと。

[臥位になることで静脈循環等に变化が起こり、患者によっては必要以上の圧迫圧がかかる恐れがあるため]

【禁忌・禁止】

適用対象（患者）

- ・重度の血行障害、うっ血性心不全及び有痛性青股腫の患者
[圧迫により症状を悪化させる危険性が高いため]
- ・感染性静脈炎の患者
[深部静脈への感染を引き起こす恐れがあるため]
- ・装着部位に極度の変形を有する患者
[適切な圧迫圧が得られないため]
- ・深部静脈血栓症の患者で、本品を装着すると肺血栓症を起こす可能性のある患者
[使用前から血栓を有していると圧迫により、血栓が肺に至る恐れがあるため]
- ・サイズ表範囲内に入らない患者
[各部位に過剰または過少な着圧がかかることになり、本品の硬化が発揮されない恐れがあるため]


【形状・構造及び原理等】

概要

本品は、種々の加工法により成型された筒状のストッキングです。編み上げた糸の弾力により装着部に同心性の圧迫力を加えると同時に、末梢部から中枢に向かって圧迫力を漸減する構造です。

なお、測定電極等を直接体表面にあてることができる穴が数カ所開いており、測定電極を付けて履く際に皮膚への圧迫を回避する構造（設計）となっています。

形状

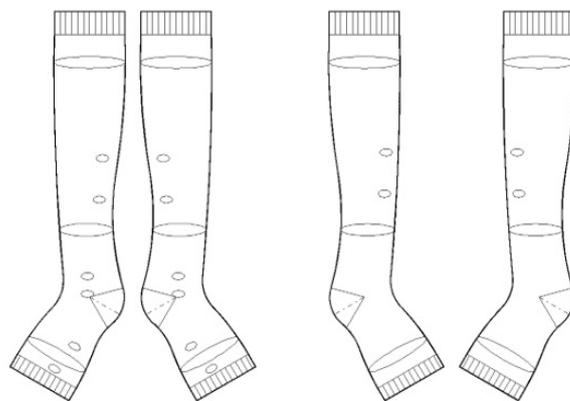

右足用 内側 左足用 右足用 外側 左足用

足のサイズ

サイズ	周囲径		
	足首	ふくらはぎ	ふともも
S	17~21cm	28~34cm	43~53cm
M	19~23cm	32~38cm	47~56cm
L	21~25cm	36~42cm	50~59cm

【使用目的又は効果】

使用目的

本品は、下肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用弾性ストッキングです。末梢から中枢に向かい漸減的に圧力を加える機能を有します。

【使用方法等】

使用方法

- 1) 装着する患者の足の各部位を測定し、サイズ表と照合し、適切なサイズを選択して下さい。
- 2) ソックス全体をたぐり寄せ、つま先を通します。
- 3) 足首まで引き上げ、かかとの位置を合わせます。
- 4) 全体的にシワや重なりができないように、ゆっくり引き上げます。

【使用上の注意】

使用注意（次の患者には慎重に適用すること）

- ・急性循環不全等末梢循環が不安定な患者
[装着部位に血行障害が発生し壊疽等の皮膚障害が起こる可能性があるため、装着部位の血流に注意してください。]

重要な基本的注意

- ・使用中、使用後に気分が悪くなったり、痛みやしびれ等の不快感、かゆみ、発疹等以上を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・サイズが合わない物や 2 枚重ねでの着用はしないでください。
- ・本品に施されている穴は、測定部位を特定するものではありません。医師の判断で適切な測定部位になるように調整してください。

相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）

併用注意（併用に注意すること）

他の圧迫療法と併用する場合には、本品単独着用時よりも高い圧迫圧が加わるため、本品が正しく着用されていることを十分確認し、適宜本品と皮膚の状態を確認してください。

有害事象

類似機器の重大な有害事象

1. 血行障害
チアノーゼ、腫脹、疼痛、しびれ、皮膚の冷感等、血行障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、適切な措置を行ってください。
2. 神経障害
腓骨神経麻痺等の神経障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、適切な措置を行ってください。
3. 皮膚障害
本品のずれ、圧迫等により、皮膚潰瘍等の皮膚障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、適切な措置を行ってください。
4. その他
本品装着部位に発赤、水疱、かゆみ、発疹、かぶれ等の皮膚障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、適切な処理を行ってください。本品を脱いだ後で皮膚障害が現れる場合もありますので、同様に適切な処理を行ってください。

その他の注意

着用感には個人差があります。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

高温多湿、水濡れを避けて、暗所で保管すること。

耐用限界

生地を経年劣化等を発見した場合には、廃棄してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ユニークメディカル

T E L : 03-3480-7259