

医療用品 4 整形用品
一般医療機器 医療用不織布（JMDNコード：34655000）
（一般医療機器 手術用被覆・保護材（JMDNコード：34654000））

ライフリーファインケアシートR未滅菌


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止（一度使用したものを再使用しないでください）

【形状・構造及び原理等】

＜形状・構造＞（代表図）

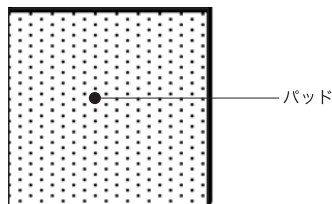

＜材質＞

- ・パッド：有孔ポリエチレンフィルム付不織布（ポリエチレン、ポリエステル）

＜原理＞

創傷面への固着を防ぐ有孔フィルム層と滲出液を透過吸収する不織布層からなり、有孔フィルム層の孔はすり鉢状の形状をしており、余分な滲出液を吸収し、逆戻りにくい構造となっている。

【使用目的、効能又は効果】

＜使用目的＞


1. 医療用不織布用途
創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。
2. 手術用被覆・保護材用途
術後創傷のために用いる適切なサイズの被覆・保護材をいう。

【品目仕様等】

- ・寸法：表示値の±10%

【操作方法又は使用方法等】

- 1) 貼付の際は、必ず孔のあいているフィルム面を創傷・適用部にあててください。間違って反対面をあてると滲出液が吸収できず、浸軟、感染等の原因になることがあります。

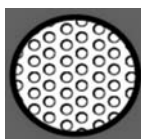

表面拡大図

孔のあるフィルム面を創部に
あててください。



断面図

- 2) 本品を創傷面に静かに置き、体液の吸収を行ってください。※
※創傷面に固定する場合は、医療用テープ・包帯等を用いてください。

【使用上の注意】

- ・本品の使用に当たり、本添付文書を良くお読みの上ご使用ください。
- ・本品は滅菌品ではありません。滅菌が必要な場合は、滅菌品をご使用ください。
- ・包装を開封したら速やかにご使用ください。
- ・包装が破損・汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないでください。
- ・パッドが汚れたり、水に濡れたりしたときは、新しいものに貼り替えてください。
- ・本品を創傷面に固定する場合は、1日1回以上の貼り替えを行い、パッドを清潔に保ってください。
- ・本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ等の皮膚の異常が認められた場合には、使用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。
- ・本品の使用により、本品が原因と思われる感染症が起きた場合には、使用を中止し、医師の診断を受けてください。
- ・本品の使用後は、感染防止に留意し、各自治体の定めた方法で廃棄してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

＜貯蔵・保管方法＞

水濡れ、直射日光、高温多湿を避け、室温で保管してください。

＜使用期限＞

上記保管条件にて保管した場合、製造日より3年間。

【包装】

製品サイズ (mm)	入り数
100×100	50 枚／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

＜製造販売業者＞

ユニ・チャームプロダクツ株式会社
香川県観音寺市豊浜町和田浜 1496-1
0875-52-4733

＜製造業者＞

株式会社ヤマガタファステム

＜販売業者＞

ユニ・チャーム株式会社
東京都港区三田 3-5-27
お問い合わせ先：いきいきダイヤル 0120-041-062