

医療用品 4 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏（JMDNコード：34864000）
（一般医療機器 医療用不織布（JMDNコード：34655000））

ライフリーファインケアシートS固定フィルム付き滅菌


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止（一度使用したものを再使用しないでください）

【形状・構造及び原理等】

＜形状・構造＞（代表図）

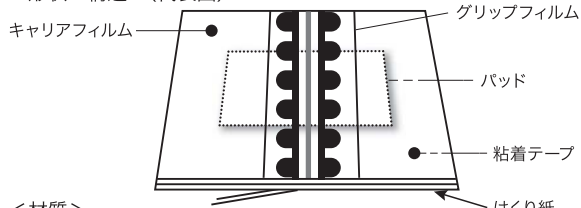

＜材質＞

- ・粘着テープ（キャリアフィルム）：ポリエチレンフィルム
- ・粘着テープ（基材）：ポリウレタンフィルム
- ・粘着テープ（粘着剤）：アクリル系粘着剤
- ・グリップフィルム：ポリオレフィンフィルム／アクリル系粘着剤
- ・パッド：有孔ポリエチレンフィルム付パルプ不織布
- ・はくり紙：上質紙／ポリエチレン／シリコーン

＜原理＞

パッドとそれを固定する用途の防水性粘着テープからなる。創傷面にパッドを当て、粘着テープで固定することにより、創傷面の被覆・保護を行う。パッドは、創傷面への固着を防ぐ有孔フィルム層と滲出液を透過吸収する不織布層からなり、有孔フィルム層の孔は、すり鉢状の形状をしており、余分な滲出液を吸収し、逆戻りにくい構造となっている。

【使用目的、効能又は効果】

＜使用目的＞

1. 救急絆創膏用途
傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。
2. 医療用不織布用途
創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。


【品目仕様等】

- ・エチレンオキシッドガス滅菌品（無菌性保証水準SAL： 10^{-6} ）
- ・製品から試験片を作成し、フェノール樹脂板に圧着後、所定の時間放置し、180度peel法にて粘着力を測定する。
：当社規定値の範囲内であること。


【操作方法又は使用方法等】

1. 貼付


- 1) 創傷面を清潔にし、水分をよく取り除いてください。
- 2) はくり紙をひらいてください。

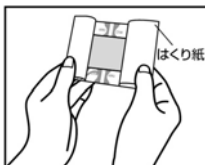


- 3) パッドを傷口にあて、はくり紙をはがしてください。

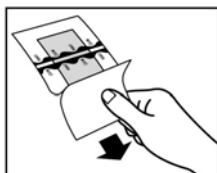

- 4) 粘着部分を押し、肌に密着させてください。

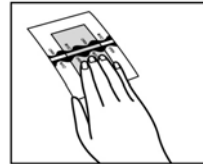

- 5) キャリアフィルムをはがしてください。

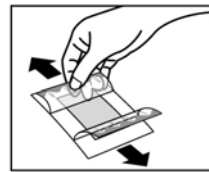

1日1回以上の貼り替えを行い、パッドを清潔に保ってください。

2. 除去

- 1) 粘着テープの端を少し剥がしてください。
- 2) 剥がした部分を持ち、他方の手で皮膚が変形しないように押さえながら、皮膚とほぼ平行に引っ張り、ゆっくり剥がしてください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本事項

- ・本品の使用に当たり、本添付文書を良くお読みの上、ご使用ください。
- ・本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ等の皮膚の異常が認められた場合には、使用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。
- ・本品の使用により、本品が原因と思われる感染症が起きた場合には、使用を中止し、医師の診断を受けてください。
- ・本品を創傷面の被覆・保護以外の目的に使用しないでください。
- ・粘着面を直接創傷部に貼付しないでください。
- ・パッド部分が汚れたり、水に濡れたりしたときは、新しいものに貼り替えてください。
- ・皮膚刺激の発生原因になるため、本品を長期間貼付したり、無理やり剥がしたりしないでください。

2. 不具合・有害事象

- ・創傷の感染症状
- ・創傷及び周囲の皮膚障害（表皮剥離、浸軟、浮腫、水疱、発赤、びらん、そう痒、アレルギー、接触性皮膚炎）
- ・固着
- ・壊死組織の増加
- ・疼痛

3. その他の注意

- ・本品は滅菌品です。個別包装を開封したらすぐにご使用ください。
- ・再滅菌しないでください。
- ・包装が破損・汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないでください。
- ・使用後は感染防止に留意し、各自自治体の定めた方法で廃棄してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

＜貯蔵・保管方法＞

水濡れ、直射日光、高温多湿を避け、室温で保管してください。

＜使用期限＞

上記保管条件にて保管した場合、製造日より1.5年間。

【包装】

製品サイズ (mm)	パッドサイズ (mm)	入り数
130×130	100×100	1枚×30袋/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

＜製造販売業者＞

ユニ・チャームプロダクツ株式会社
香川県観音寺市豊浜町和田浜 1496-1
0875-52-4733

＜製造業者＞

新タック化成株式会社

＜販売業者＞

ユニ・チャーム株式会社
東京都港区三田 3-5-27
お問い合わせ先：いきいきダイヤル 0120-041-062