

ご使用前に、この添付文書を必ず読んで正しくお使いください。
また、わからないときはいつでも説めるように保存しておいてください。

2012年12月25日(第1版) *2015年1月(第2版)

届出番号: 37B3X00001000017

術01 月経処理用タンポン
一般医療機器 生理用タンポン 23694000

販売名: ソフィソフトa

再使用禁止

【警告】

タンポンの使用により、体質・体調等によっては、

トキシックショック症候群 (Toxic Shock Syndrome : TSS)が発症する可能性があります。

症状: 突然の高熱、発疹・発赤、倦怠感、嘔吐、下痢、粘膜充血、血圧低下など

もし、上記のような症状が発生した場合、直ちにタンポンの使用を中止し取り出し、この説明書を持つて産婦人科など専門医を受診してください。その際、月経中であることを医師にお伝えください。また、使用に際して不安がある方は、ご使用前に産婦人科などの専門医に相談してください。

TSSの発症の可能性を軽減する為、次のことを守ってください。

- ① タンポンは連続使用せず、ナフキンと交互に使用してください。
- ② 1回のタンポンの使用は8時間を超えないでください。
- ③ 8時間を超えるような就寝の場合は使用しないでください。


TSSとは、黄色ブドウ球菌の產生する毒素が原因で起こる急性疾患です。黄色ブドウ球菌は鼻腔・皮膚・頭髪・腋の下・陰毛・陰などにも存在し、タンポンの使用の有無に関係なく、切り傷や火傷などによっても発症する可能性があります。ごくまれに、死に至る重篤な症状を引き起こす可能性もあります。使用に際しては、手指が清潔でなかったり、長時間使用や、取り出し忘れなどにより、黄色ブドウ球菌が繁殖し、毒素を產生しやすくなるといわれています。この文書に従って使用することで、TSS発症の可能性を軽減することができると考えられます。

【禁忌・禁示】(してはいけないこと)

- 1) 再使用禁止。
- 2) 過去にTSSを発症した事がある人は、使用しないでください。
- 3) 分泌物(おりもの)に異臭がある人は、使用しないでください。
- 4) タンポンのヒモを切って使用しないでください。(取り出せなくなります。)
- 5) タンポンを2本同時に挿入しないでください。(取り出せなくなります。)

【使用目的】
体内に挿入し理由を取扱
するものです。

形状・構造及び仕組み
◆ 着脱式: レーヨン/ポリエチレン
◆ ヒモ: 紙/ポリエチレン
◆ アプリケーター: ポリエチレン

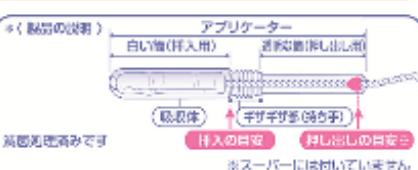

【使用方法】
正しい使い方(解説)は、
裏面に記載

使用上の注意:

使用上の注意は、裏面に記載

※ 保管方法及び有効期限等

【保管方法】
水濡れ、過度や温度の高いところ、直射日光のあたるところを避けて、
瓶に入れて衛生的に保管してください。

また、香料、界面活性剤などといっしょに保管しないでください。

(使用期間)

瓶表面に合わせて、4-8時間以内で使用してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元 ユニ・チャームプロダクツ株式会社
〒789-1602 宮川県豊田市豊田町田洪1496-1

販売元 ユニ・チャーム株式会社
〒108-8575 東京都港区三田3-5-27

■商品に関するお問い合わせは、お米屋様ダイヤル 0120-423-001 営業時間(祝日を除く) 月曜日~金曜日 9:30~17:00

使用方法等(正しい使い方)

1. 挿入前に

- ① 手指を清潔に
- ② ヒモを引っ張ってヒモが切れないと、抜けないことをチェック。(図1)
着脱式を開けタンポンを取り出す前に、着脱式の上からアプリケーターをつかみ、もう片方の手でタンポンのヒモを引っ張ってとれないと事を確認しましょう。
- ③ アプリケーターの先の形をチェック。(図2)
アプリケーターの先がつぶれたり、割れたりしていないか確認してください。



2. 挿入の仕方

〈正しい位置に入れれば違和感なし!〉

挿入後違和感があるときはタンポンの挿入位置が浅いなど正しい位置に入っていないということです。タンポンを体から取り出し、新しいタンポンを使って使い方の順に使いもう一度挿入してください。


正しい位置



× 正しくない位置
タンポンの位置が浅いので違和感があります



- ① ギザギザ部をしっかり持つ
ギザギザ部を握り、中指をしっかりと握り、口の内側(骨上に挿入)の内側(斜め後方に挿入)
- ② 素晴らしい姿勢を温ぶ
体の力を放してリラックスし、上腕の中から肩も常に挿入できる姿勢を保ちましょう。(骨立)(骨上に挿入)(内側(斜め後方に挿入))

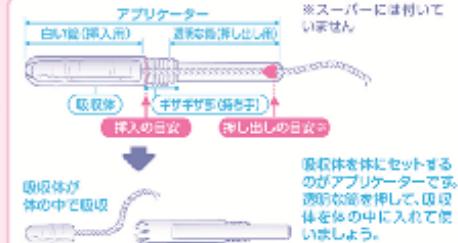


吸収体を体にセットするのがアプリケーターであ
透明な筒を押して、因縁
体を体の中に入れて使
いましょう。

- ③ 白い管の先端を
口に当てる
もう片方の手を握ってタンポンを白い管(スリム)の先端を口に当てる。
- ④ 挿入の段階まで
ゆっくり白い筒を挿入
息を吐きながらリラックスして、ギザギザ部を握った白い管(スリム)の先端を口に当たるまで白い筒を挿入します。



POINT!!

- ⑤ もう片方の手で押し出しの目安が
用れるまで透明な筒を押しきる
ギザギザ部を握った白い筒を口に当てる間に、手で「カチ」という感触がありタンポンは正しい位置に入ります。

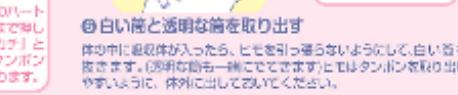

POINT!!
挿入時の「カチ」という音が聞こえなければ、正
しく挿入された証!


3. 取り出し方

体の外にでているヒモの端口に近い部分を持ち、
フターッと巻きはさながら体の力を抜いて抜め
前にゆっくり引き出してください。



使用上の注意

- ◆ 使用前
・万一、着脱式が壊れている場合は使用しないでください。
・誤飲誤呑ですが、外因の附着物は運営中にご使用ください。
・最後8回目まで又は、出血量初めての生理時を用をあひ
かえください。
・ヒモは切らずに体の外に必ず出して使用ください。

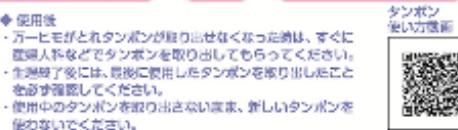

タンポン
使い方注意

◆ 使用後
・万ヒモがとれタンポンが取り出せなくなつた時は、すぐ
に産婦人科などでタンポンを取り出してください。
・生後8ヶ月には、最初に使用したタンポンを取り出したこと
を必ず確認してください。
・便器中のタンポンを取り出さないまま、新しいタンポンを
使うのを防ぐために、必ずお手洗いください。

