

ご使用前に、この添付文書を
必ず読んで正しくお使いください。
また、わからないときにいつでも
読めるように保存しておいてください。

販売名：ソフィコンパクトa



初めてでもうまいく!
「使い方動画」



タンポン 使い方 で 検索

再使用禁止

*一部機種では
ご覧いただけ
ない場合が
あります。



【警告】

タンポンの使用により、体質・体調等によっては、
トキシックショック症候群 (Toxic Shock Syndrome：TSS) が発症する可能性があります。

症状：突然の高熱、発疹・発赤、倦怠感、嘔吐、下痢、粘膜充血、血圧低下など
もし、上記のような症状が発生した場合、直ちにタンポンを取り出して使用を中止し、この説明書を持って産婦人
科など専門医を受診してください。その際、月経中であることを医師にお伝えください。また、使用に際して不安
がある方は、ご使用前に産婦人科などの専門医に相談してください。

TSSの発症の可能性を軽減する為、
次のことを守ってください。

- ①タンポンは連続使用せず、ナプキンと交互に使用してください。
- ②1回のタンポンの使用は8時間を超えないでください。
- ③8時間を超えるような就寝の場合には使用しないでください。

TSSとは：黄色ブドウ球菌の産生する毒素が原因で起こる急性疾患です。黄色ブドウ球菌は鼻腔・皮膚・頭髮・脇
の下・陰毛・膣などにも存在し、タンポンの使用の有無に関係なく、切り傷や火傷などによっても発症する可能性
があります。ごくまれに、死に至る重篤な症状を引き起こす可能性もあります。使用に際しては、手指が清潔でな
かったり、長時間使用や、取り出し忘れなどにより、黄色ブドウ球菌が増殖し、毒素を産生しやすくなるといわれ
ています。この文書に従って使用することで、TSS発症の可能性を軽減することができると考えられます。

【禁忌・禁止】

(してはいけないこと)

- 1) 再使用禁止。
- 2) 過去にTSSを発症した事がある人は、使用しないでください。
- 3) 分泌物(おりもの)に異臭がある人は、使用しないでください。
- 4) タンポンのヒモを切って使用しないでください。(取り出せなくなります。)
- 5) タンポンを2本同時に挿入しないでください。(取り出せなくなります。)

* 形状・構造及び原理等
滅菌処理済みです
アプリケーター：ポリエチレン
吸収体：レーヨン/ポリエステル ヒモ：綿・ポリエステル

使用目的 膣内に挿入し経血を吸収処理するものです。

使用方法等 正しい使い方(図解)は、裏面に記載

使用上の注意

●使用前

- ・万一、個包装が破損している場合は使用しないでください。
- ・滅菌済製品ですが、外箱の開封後は速やかにご使用ください。
- ・産後8週間まで又は、出産後初めての生理時は使用をおひかえください。
- ・ヒモは切らずに体の外に必ず出して使用ください。

●使用后

- ・万一ヒモがとれタンポンが取り出せなくなった時は、すぐに産婦人科などで
タンポンを取り出してもらってください。
- ・生理終了後には、最後に使用したタンポンを取り出したことを必ず確認して
ください。
- ・使用中のタンポンを取り出さないまま、新しいタンポンを使わないでください。
- ・アプリケーター、吸収体、個包装はトイレに流さないでください。
- ・廃棄に関しては、お住まいの自治体の指示に従って処理してください。


* 保管方法及び有効期間等

(保管方法) 水ぬれ、温度や湿度の高いところ、直射日光のあたる
ところをさけて、箱に入れて衛生的に保管してください。
また、香料、薬品、洗剤などといっしょに保管しないで
ください。

(使用期間) 4～8時間以内で使用してください。

使用前の確認事項

- ① 両手を使います。両手を清潔に!
- ② 個包装を開けタンポンを取り出す前に、
ヒモを引っ張ってとれない事を確認。
(図1)
- ③ アプリケーターの先の形をチェック。
(図2)
つぶれたり、割れたりしていないか確認。

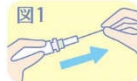

【製造販売業者及び
製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

ユニ・チャームプロダクツ株式会社
〒769-1602 香川県観音寺市豊浜町和田浜1496-1

＊＊ 発 売 元

ユニ・チャーム株式会社
〒108-8575 東京都港区三田3-5-19

商品に関するお問い合わせは

0120-423-001

受付時間(祝日を除く)
月曜日～金曜日 9:30～17:00