

ご使用前に、この添付文書を必ず読んで正しくお使いください。また、わからないときにいつでも読めるように保存しておいてください。

タンポンは生理日以外に使用しないでください。



初めてでもうまいく！
「使い方動画」
タンポン 使い方

で 検索



*一部機種ではご覧
いただけない場合が
あります。

商品に関するお問い合わせは

0120-423-001

受付時間（祝日を除く）
月曜日～金曜日 9:30～17:00

2018年12月(第1版)

衛01月経処理用タンポン
一般医療機器 生理用タンポン 35694000

届出番号：37B3X00001000021

再使用禁止

販売名：ソフィソフトd

【警告】

タンポンの使用により、体質・体調等によっては、トキシックショック症候群（Toxic Shock Syndrome：TSS）が発症する可能性があります。症状：突然の高熱、発疹・発赤、倦怠感、嘔吐、下痢、粘膜充血、血圧低下など
もし、上記のような症状が発生した場合、直ちにタンポンを取り出して使用を中止し、この説明書を持って産婦人科など専門医を受診してください。その際、月経中であることを医師にお伝えください。また、使用に際して不安がある方は、ご使用前に産婦人科などの専門医に相談してください。

- TSSの発症の可能性を軽減する為、次のことを守ってください。
- ① タンポンは連続使用せず、ナプキンと交互に使用してください。
 - ② 1回のタンポンの使用は8時間を超えないでください。
 - ③ 8時間を超えるような就寝の場合には使用しないでください。

TSSとは：黄色ブドウ球菌の産生する毒素が原因で起こる急性疾患です。黄色ブドウ球菌は鼻腔・皮膚・頭髮・脇の下・陰毛・膣などにも存在し、タンポンの使用の有無に関係なく、切り傷や火傷などによっても発症する可能性があります。ごくまれに、死に至る重篤な症状を引き起こす可能性もあります。使用に際しては、手指が清潔でなかったり、長時間使用や、取り出し忘れなどにより、黄色ブドウ球菌が増殖し、毒素を産生しやすくなるといわれています。この文書に従って使用することで、TSS発症の可能性を軽減することができますと考えられます。

【禁忌・禁止】（してはいけないこと）

- 1) 再使用禁止。
- 2) 過去にTSSを発症した事がある人は、使用しないでください。
- 3) 分泌物（おりもの）に異臭がある人は、使用しないでください。
- 4) タンポンのヒモを切って使用しないでください。（取り出せなくなります。）
- 5) タンポンを2本同時に挿入しないでください。（取り出せなくなります。）


使用前の確認事項



- ① 両手を使います。両手を清潔に！
- ② 個包装を開けタンポンを取り出す前に、ヒモを引っ張ってとれない事を確認。（図1）
- ③ アプリケーターの先の形をチェック。つぶれたり、割れたりしていないか確認。（図2）

形状・構造及び原理等

滅菌処理済みです

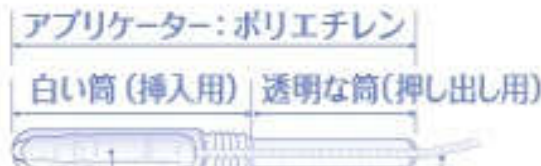

吸収体：レーヨン/ポリエステル ヒモ：綿・ポリエステル

使用目的 腔内に挿入し経血を吸収処理するものです。

使用方法等 正しい使い方(図解)は、裏面に記載

保管方法及び有効期間等

(保管方法)

水ぬれ、温度や湿度の高いところ、直射日光のあたるところを
さけて、箱に入れて衛生的に保管してください。

また、香料、薬品、洗剤などといっしょに保管しないでください。

(使用期間)

4～8時間以内で使用してください。

使用上の注意

- 使用前・万一、個包装が破損している場合は使用しないでください。
 - ・滅菌済製品ですが、外箱の開封後は速やかにご使用ください。
 - ・産後8週間まで又は、出産後初めての生理時は使用をおひかえください。
 - ・ヒモは切らずに体の外に必ず出して使用ください。
- 使用后・万一ヒモがとれタンポンが取り出せなくなった時は、すぐに産婦人科などでタンポンを取り出してもらってください。
 - ・生理終了後には、最後に使用したタンポンを取り出したことを必ず確認してください。
 - ・使用中のタンポンを取り出さないまま、新しいタンポンを使わないでください。
 - ・アプリケーター、吸収体、個包装はトイレに流さないでください。
 - ・廃棄に関しては、お住まいの自治体の指示に従って処理してください。

【製造販売業者及び
製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 ユニ・チャームプロダクツ株式会社
〒769-1602 香川県観音寺市豊浜町和田浜1496-1

発売元 ユニ・チャーム株式会社
〒108-8575 東京都港区三田3-5-27