

## 【警告】

月経カップの長時間使用によっては、**トキシックショック症候群(TSS)**が発症する可能性があります。

症状:突然の高熱を伴って発疹・発赤、倦怠感、嘔吐、下痢、粘膜充血など


もし、上記のような症状が発症した場合、直ちに月経カップを取り出して、使用を中止して、すみやかに産婦人科などの専門医に相談してください。

## 【禁止・禁忌】

- 1) 過去にTSS(トキシックショック症候群)を発症したことがある人は、使用しないでください。ごくまれに、重篤な症状を引き起こす可能性もあります。  
症状を早期に発見し、適切な治療をうけることが大切です。
- 2) 泌尿器系・婦人科系の疾患を罹患中の人は使用をやめてください。
- 3) 1回の挿入時間は8時間を超えないでください。
- 4) 出産後の最初の月経時の使用は専門医にご相談ください。

## 形状・構造及び原理等

本品は、月経を収集するための収集用のカップと取り出しの目印となるリングが一体となって構成されている。

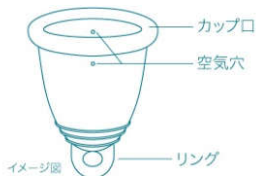

## 使用目的又は効果

膣内に挿入し経血を回収処理するものです。

## 使用方法等

- 1) カップ口の戻りを持ち抑え、膣内に挿入する。
- 2) 挿入後、カップは膣内壁に密着する。
- 3) 正しい使い方(図解)は、裏面に記載。

## 使用上の注意

- 準備 ●使用前後に消毒をしてください。
- 使用前 ●両手指を清潔にします。●空気穴が塞がっていないか、確認してください。
- 挿入中 ●経血の量に関係なく、必ず8時間ごとに本品を取出し洗浄してください。
- 取出し時 ●万一起り出せなくなった時は、すぐに産婦人科などで取り出してもらってください。

## 保管方法及び有効期間等

- 水に濡れる場所や、温度湿度の高いところ、直射日光の当たるところは避けて保管ください。
- 子供や動物がいじらない衛生的な場所に保管ください。
- 付属の保管袋に入れて保管下さい。ビニール袋やプラスチックケースの密閉容器に入れての保管はお避け下さい。カビが生える原因となります。

## 取扱い上の注意

- 【使用前の注意】 ●使用前の洗浄作業を必ず実施する。
- 【使用後の注意】 ●ひび割れや破損にお気づきになりましたら、すぐに新しいカップにお取替ください。  
●プラスチック製品ですので、カップはトイレに流さないでください。  
廃棄に関しては、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。

## 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等

製造販売業者	ユニ・チャームプロダクツ株式会社 香川県観音寺市豊浜町和田浜1496-1
外国製造業者	Me Luna GmbH Brand 57 91729 Haundorf, Germany
※ 発 売 元	ユニ・チャーム株式会社 東京都港区三田3-5-19

商品に関するお問い合わせは

0120-423-001

受付時間(夜日を除く) 月曜日～金曜日 9:30～17:00