

医療器具 54 医療用拭綿子


一般医療機器 医科用拭綿子 10172000

フロックスワブ・パウチタイプ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】
フロックスワブ・パウチタイプは、プラスチック製軸の先端にナイロン製の植毛構造による綿球を付けた検体採取用のスワブである。

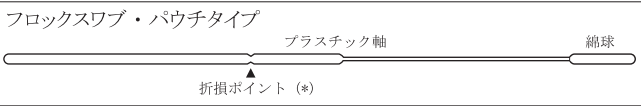



*: 折損ポイントの無いタイプもあります

【使用目的、効能又は効果】
細菌検査等のための試料を採取することを目的とした器具である。

【操作方法又は使用方法等】
本製品を使用した細菌を含む臨床検体などの採取は次の通り。

1. 「PEEL HERE」と書かれた箇所
パウチを開ける。(図1)

2. 包装からスワブを取り出し、綿球部分
で検体を採取する。汚染の可能性を
回避するために、スワブの先端は感染
の疑いのある領域に限定して接触させ
る。(図2)

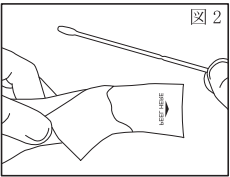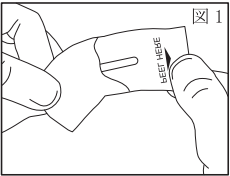

- 【使用上の注意】
1. 本品の使用は1回限り。再使用は禁止する。
 2. 開封後は速やかに使用する。
 3. スワブによる検体の採取は、十分習熟した人の指示のもとに実施すること。
 4. 本品は滅菌済みなので、包装に破れやピンホールなどがあつたり、製品に破損や折れ曲がり等があった場合には使用しない。
 5. 検体の輸送には適正な容器を使用し、二次感染に注意すること。
 6. 全ての検体は病原菌に汚染されているものとして、注意して 取り扱うこと。
 7. 患者から検体を直接採取するときは、力を入れすぎてスワブの軸を折ったり、採取する粘膜などの部位を傷つけないように、無理な力をかけないこと。
 8. 使用期限の過ぎたものは使用しない。
 9. 軸部分は弾力性があるので、使用する際には試料が跳ねないように注意すること。
 10. 使用後は速やかに滅菌処理してから廃棄すること。廃棄の際は、医療廃棄物等に関する規定などの各種規制に従い、各施設の責任において処理すること。

- 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】
1. 貯蔵・保管方法： 室温下（2℃～30℃）で水濡れに注意し、直射日光や高温多湿を避けて保管する。
 2. 使用期限： 外箱、パウチに記載。使用期限の過ぎたものは使用しないこと。

商品コード	包装単位	折損ポイント位置（綿球先端から）
519CS01	100 本	100mm
502CS01	100 本	80mm
520CS01	100 本	30mm
518CS01	100 本	100mm
501CS01	100 本	80mm
503CS01	100 本	100mm
516CS01	100 本	100mm
525CS01	100 本	80mm
509CS01	100 本	N/A
511CS01	50 本	N/A
570CS01	100 本	80mm
528CS01	100 本	N/A
56380CS01	100 本	80mm
56780CS01	100 本	80mm
56750CS01	100 本	50mm
534CS01	100 本	N/A

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】
製造販売業者： 有限会社テクノアメニティ
〒621-0821 京都府亀岡市篠町柏原町頭 56
TEL：0771-58-0023

外国製造業者： コパン イタリア エス ピー エイ
(COPAN Italia S.p.A.)

国名：イタリア